




DK50 9X4VRT/M

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

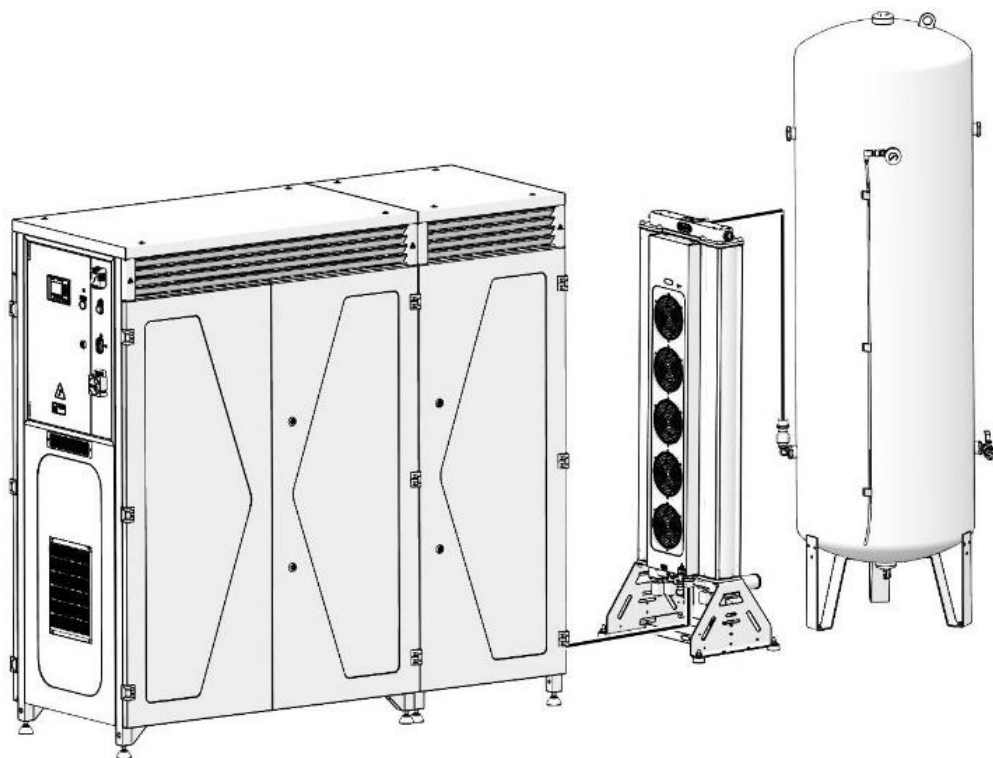

CE

КОМПРЕССОР

DK50 9x4VRT/M



EKOM spol. s r. o.
Priemyselná 5031/18
SK-921 01 Piešťany
Slovak Republic
tel.: +421 33 7967255
fax: +421 33 7967223

www.ekom.sk
email: ekom@ekom.sk

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ

10/2024



NP-DK50-9x4VRTM-AD-RU-
9_10-2024
112000452-0004

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ	5
1. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	5
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	5
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗНАКИ	5
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	7
6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	9
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	10
7. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ.....	10
8. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	11
9. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИЗДЕЛИЯ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
УСТАНОВКА.....	20
10. УСЛОВИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ.....	20
11. КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА.....	22
12. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.....	27
13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	30
14. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК УСТРОЙСТВА.....	38
15. СХЕМА ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ	39
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	41
16. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА.....	42
17. ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА.....	51
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	53
18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	53
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ	69
19. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГАХ ПО РЕМОНТУ.....	71
20. ХРАНЕНИЕ	71
21. УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	71
ПРИЛОЖЕНИЕ	73
22. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ	73

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВАШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Изделие зарегистрировано и соответствует требованиям Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Изделие соответствует системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.

1. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Данное изделие соответствует требованиям Регламенту о медицинских изделиях (2017/745/EU) (MDR). Его можно

безопасно использовать по назначению при условии соблюдения всех требований техники безопасности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинский компрессор используется в



Воздух, подаваемый из компрессора, не подходит для подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

качестве источника чистого, безмасляного, сжатого воздуха для питания активных медицинских устройств (например в стоматологии, диагностике и

лабораториях и т.д.), где параметры и свойства сжатого воздуха подходят определенному целевому назначению.

Применение данного изделия для других целей, не соответствующих назначению устройства, считается ненадлежащим использованием. Производитель не несет ответственности за повреждения и травмы, вызванные ненадлежащим использованием устройства.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Противопоказания или побочные эффекты неизвестны.

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗНАКИ

В руководстве пользователя, на самом изделии и его упаковке используются следующие символы и знаки:



Общее предупреждение



Предупреждение. Опасность поражения электрическим током



Предупреждение. Компрессор управляется автоматически




Предупреждение. Горячая поверхность



Общие предупреждения



Следуйте указаниям, содержащимся в руководстве пользователя

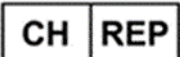	Маркировка CE
	Медицинское изделие
	Серийный номер
	Артикул комплекта
	Уникальный идентификатор изделия
	Швейцарский уполномоченный представитель
	Швейцарский импортер
	Заземляющее соединение
	Клемма заземления
	Предохранитель
	Вход сжатого воздуха
	Выход сжатого воздуха
	Вход кабеля управления
	Маркировка на упаковке — ХРУПКИЙ ПРЕДМЕТ
	Маркировка на упаковке — ЭТОЙ ЧАСТЬЮ ВВЕРХ
	Маркировка на упаковке — ОБЕРЕГАТЬ ОТ ДОЖДЯ
	Маркировка на упаковке — ПРЕДЕЛЫ ТЕМПЕРАТУР
	Маркировка на упаковке — ШТАБЕЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНО
	Маркировка на упаковке — ПРИГОДНО ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
	Производитель

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Данное изделие спроектировано и произведено таким образом, чтобы не представлять опасности для пользователя и окружающей среды при условии надлежащей эксплуатации. Имейте в виду перечисленные ниже предупреждения. Это поможет свести к минимуму уровень риска.

5.1. Общие предупреждения

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!

- нное руководство пользователя поможет в правильной установке, эксплуатации и техническом обслуживании изделия. Оно входит в комплект поставки изделия и должно всегда храниться поблизости. В данном руководстве содержится информация, с которой необходимо ознакомиться для надлежащей эксплуатации изделия по назначению.
- Оборудование, содержащее конденсационный осушитель, поставляется с отдельным руководством для соответствующего компонента.
- Защиту устройства во время транспортировки гарантирует только оригинальная упаковка. Оригинальную упаковку следует сохранить на случай возврата оборудования. Производитель не предоставляет гарантии в случае повреждений, вызванных ненадлежащей упаковкой при возврате изделия в течение гарантийного периода.
- При транспортировке и перемещении изделия следует использовать вилочные автопогрузчики или другое грузоподъемное оборудование.
- Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате применения

дополнительных принадлежностей, которые не указаны или не рекомендованы производителем.

- Производитель гарантирует безопасность, надежность и функционирование устройства только при соблюдении таких условий:
 - установку, перенастройку, исправления, изменения и ремонтные работы осуществляют производитель, его представитель или уполномоченный производителем поставщик услуг.
 - оборудование эксплуатируется в соответствии с руководством пользователя.
- Данное руководство пользователя соответствует конфигурации изделия и на момент печати отвечает требованиям всех стандартов безопасности и техническим условиям. Производитель оставляет за собой все права на патентную защиту своих методов, названий и конфигурации.
- Перевод руководства пользователя следует выполнять с учетом всей доступной информации. В случае сомнений требуется использовать версию на словацком языке.

5.2. Общие предостережения по безопасности

Производитель разработал и изготовил изделие таким образом, чтобы максимально сократить все риски при условии правильной эксплуатации. Производитель считает своей обязанностью изложить указанные ниже общие требования техники безопасности.

- При эксплуатации изделия следует соблюдать все законы и нормативные акты, действующие в месте использования оборудования. Оператор и пользователь несут ответственность за соблюдение всех соответствующих

нормативных актов для безопасной эксплуатации.

- Только использование деталей и узлов, изготовленных производителем, гарантирует безопасность обслуживающего персонала и бесперебойную работу самого изделия. Разрешается применять только те дополнительные принадлежности и детали, которые указаны в технической документации или утверждены производителем.
- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения или сопутствующие риски, если используются принадлежности и части, не указанные в технической документации или не разрешенные непосредственно производителем. На неисправности, возникшие в результате применения принадлежностей или расходных материалов, не указанных и не рекомендованных производителем, гарантия не распространяется.
- Перед каждым использованием устройства оператору необходимо убедиться, что оно работает надлежащим образом и безопасно для эксплуатации.
- Пользователь/оператор должен уметь правильно и безопасно эксплуатировать оборудование. Пользователь, управляющий оборудованием, должен обладать надлежащей квалификацией и опытом.
- Необходимо составить инструкции для персонала, управляющего оборудованием.
- Во время запуска и эксплуатации оборудования необходимо использовать средства защиты органов слуха.
- Запрещается эксплуатировать оборудование в местах, где могут присутствовать легковоспламеняющиеся газовые смеси, например в операционных,

или в зонах, где могут быть огнеопасные смеси твердых веществ, например угольная пыль.

- Легковоспламеняющиеся материалы взрывоопасны!
- Запрещается эксплуатация оборудования в местах с повышенной влажностью.
- Пользователь обязан немедленно уведомить поставщика в случае возникновения каких-либо нежелательных явлений или проблем, непосредственно связанных с эксплуатацией оборудования.
- О любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с использованием устройства, необходимо сообщить изготовителю и в компетентный орган государства-члена ЕС, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.

5.3. Предупреждения по безопасности работы электрической системы

- Устройство должно быть заземлено.
- Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что ее напряжение и частота соответствуют данным, указанным на номерной табличке оборудования.
- Перед пуском в эксплуатацию необходимо проверить оборудование и присоединенные воздушные распределительные сети на предмет повреждений. Немедленно заменяйте все поврежденные электропровода и трубопроводы сжатого воздуха.
- Если возникла техническая неисправность или опасная ситуация, незамедлительно отсоедините устройство от сети.
- При ремонте и техническом обслуживании соблюдайте следующие требования:

- оборудование отключено от электросети
- во всех магистралях сброшено давление
- Установку или расширение функциональности оборудования должны осуществлять

производитель или квалифицированный персонал, подготовленный производителем.

- К установке электрических комплектующих допускаются только квалифицированные электрики!

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Компрессор поставляется от производителя в транспортной упаковке. Она защищает изделие от повреждений во время транспортировки.



Возможно повреждение пневматических компонентов.

Компрессор можно транспортировать только после полного отведения воздуха. Перед перемещением или транспортировкой компрессора сбросьте давление воздуха в ресивере, напорных шлангах и камерах осушителя, а также слейте водяной конденсат из ресивера и отделителя конденсата на осушителя



Сохраните оригинальную заводскую упаковку на случай, если понадобится вернуть устройство. Во время транспортировки используйте оригинальную заводскую упаковку, поскольку она обеспечивает оптимальную защиту изделия. При возврате изделия в течение гарантийного срока производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные ненадлежащей упаковкой.



Компрессор поставляется в вертикальном положении и должен быть зафиксирован с помощью транспортных ремней.



При транспортировке и хранении берегите компрессор от влаги, загрязнений и экстремальных температур. Не храните компрессор вблизи летучих химических веществ.



В противном случае утилизируйте оригинальную упаковку экологически безопасным способом. Упаковочный картон можно перерабатывать вместе со старой бумагой.



Запрещается хранить или транспортировать оборудование в условиях, отличных от указанных ниже.

6.1. Условия окружающей среды

Изделия можно хранить и перевозить только в транспортных средствах, не содержащих остатков летучих химических веществ, при указанных ниже климатических условиях:

Температура	от -25 до +55 °C (24 ч при температуре до +70 °C)
Относительная влажность	макс. 90% (при отсутствии конденсата)


ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

7. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ


Компрессор производится в следующих вариантах исполнения::

DK50 9x4VRT/M	Состоит из модулей: 1 модуль компрессора с 9 агрегатами и пультами управления для узла в сборе; 2 адсорбционный осушитель с соединительными шлангами; 3 модуль ресивера.
----------------------	--

DK50 9x4VRTS/M	Состоит из модулей: 1 модуль компрессора с шумопоглощающим корпусом, содержащий 9 агрегатов и пульта управления для узла в сборе; 2 адсорбционный осушитель с соединительными шлангами; 3 модуль ресивера.
-----------------------	--

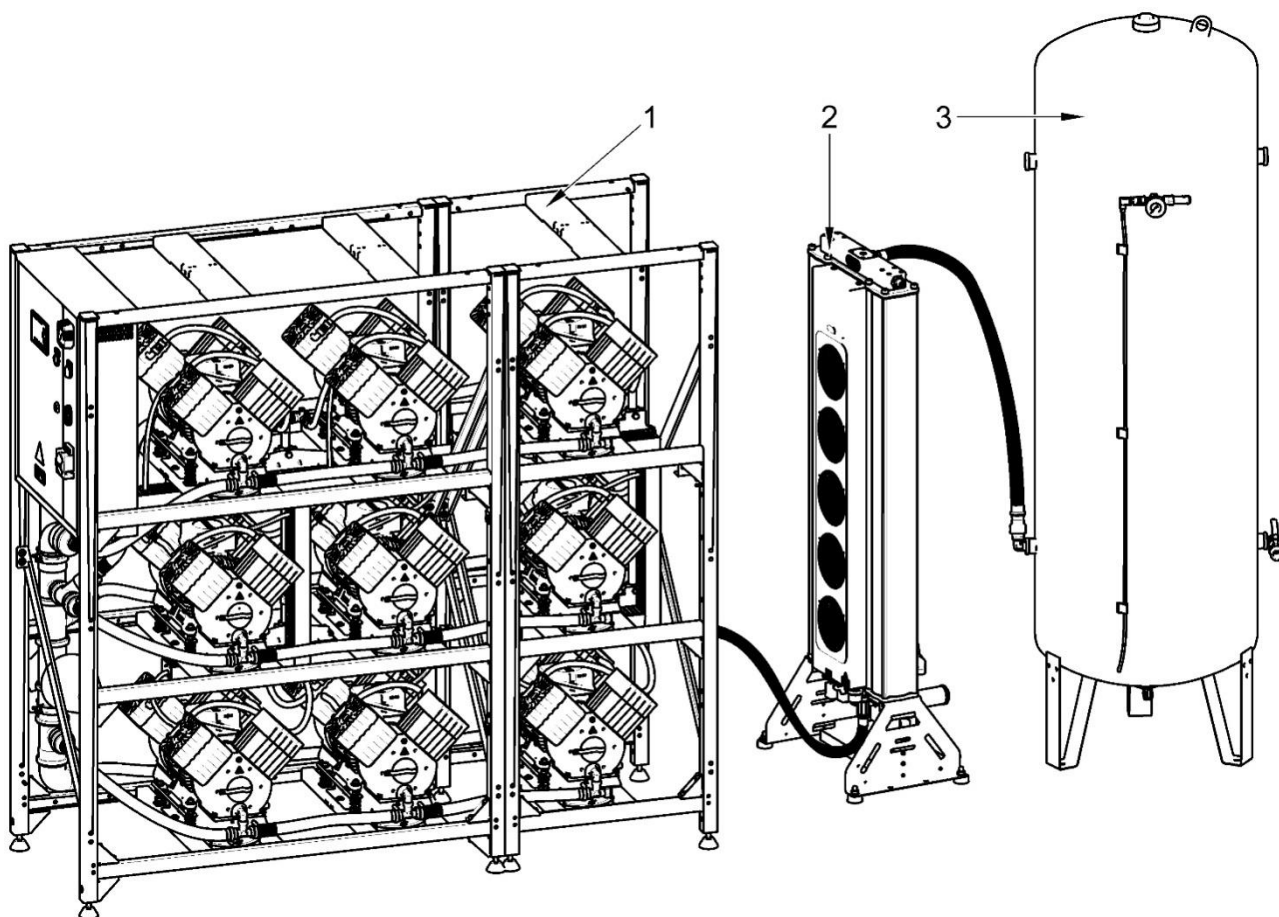

DK50 9x4VRT/M

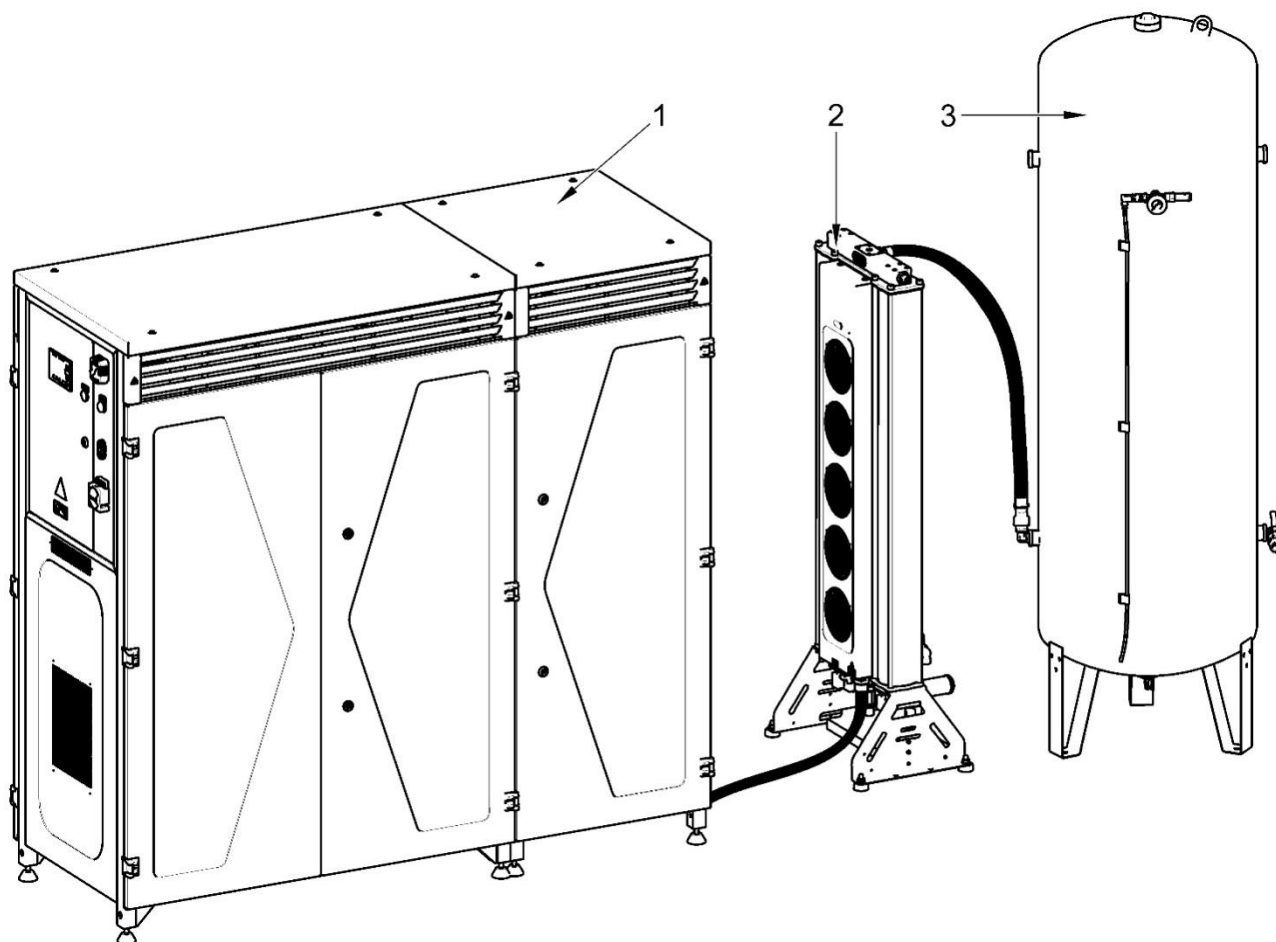

DK50 9x4VRTS/M

8. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности, не входящие в стандартный заказ, необходимо приобретать дополнительно.

Центральный всасывающий агрегат (комплект)

Данный агрегат включает в себя центральный фильтр соответствующего размера, расположенный на модуле

компрессора, со всасывающими воздуховодами, соединенными с отдельными компрессорами. Благодаря комплекту увеличивается интервал замены центрального фильтра (теперь каждые 2000 ч) и исчезает необходимость в замене фильтров на отдельных компрессорах — достаточно заменить центральный.

Тип компрессора	Артикул комплекта
DK50 9x4VRT/M	447000001-067
DK50 9x4VRTS/M	447000001-066

Набор выходных фильтров сжатого воздуха

Компрессор можно оснастить комплектом регуляторов на выходе сжатого воздуха (если указана такая возможность). Комплект фильтров можно оснастить

регулятором давления. Комплекты фильтров — это принадлежности, предназначенные для всех перечисленных выше компрессоров.



Если требуется другой уровень фильтрации воздуха, такие требования необходимо согласовать с поставщиком, четко указав их во время заказа.

Тип	Модел, в которых используется	Степень фильтрации (мкм)	Функция байпас*	Номер артикула
FS 41F	DK50 9x4VRT/M	1 um	Нет	604014119-006
FS 41M		1um+0,1 um		604014119-010
FS 41S		1 um +0,01 um		604014119-025
FS 41AH		1um+AC+HC(0,01um)		604014119-011

*) Эти FS не содержат байпас фильтра, который обеспечит непрерывный поток воздуха при замене фильтрующего элемента. Набор с байпас необходимо заказывать отдельно.

давления на выходе сжатого воздуха (если указана такая возможность). Регулятор следует выбирать исходя из его применения в составе комплекта фильтров или отдельно. Регулятор должен обеспечивать постоянное давление на выходе.

Узел регулятора комплекта фильтра

Компрессор можно оснастить регулятором

Тип	Модел, в которых используется	Артикул комплекта
Регулятор в сборе	DK50 9x4VRT/M	604014125-000

Кронштейны комплекта фильтров



Для каждого комплекта фильтров следует заказать соответствующий кронштейн.

Тип	Модел, в которых используется	Артикул комплекта
Кронштейн для монтажа на компрессор	DK50 9x4VRT/M	603022576-000
Кронштейн для настенного монтажа		603014120-000

Корпус модуля компрессора (шумоподавление)

Корпус модуля компрессора позволяет снизить шум, производимый

компрессором, до 11 дБА по сравнению с модулем компрессора без корпуса. В то же время сам агрегат обеспечивает достаточное охлаждение при непрерывной работе (класс S1).

Модел, в которых используется	С центральным всасывателем	Номер артикула
DK50 9x4VRT/M	Да	447000001-068
DK50 9x4VRT/M	Нет	447000001-069

9. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ИЗДЕЛИЯ

9.1. Компрессор с адсорбционным осушителем

Рис. 1: Агрегаты компрессора (12) всасывают атмосферный воздух через всасывающие фильтры и нагнетают его через обратные клапаны в систему подачи сжатого воздуха. Соединительный шланг (13) соединяет эту систему с внешним адсорбционным осушителем (8). От входа к модулю осушителя воздух сначала охлаждается во встроенном охладителе (9), затем проходит через отделитель

конденсата (10) и попадает в активную камеру с адсорбентом (11), где воздух осушается. Часть воздуха подается во вторую камеру восстановления, где этот воздух используется для удаления влаги из адсорбента, после чего он выпускается через глушитель (21). Активная камера включается циклически. Сухой отфильтрованный воздух проходит через обратный клапан и попадает в ресивер (2). После этого обработанный сжатый воздух готов к повторному использованию в ресивере.

Описание для рисунков 1–2:

- | | |
|---|--|
| 1. Модуль компрессора | 13. Соединительные шланги |
| 2. Ресивер | 14. Электрические кабели |
| 3. Распределительный ящик и распределительный щит | 15. Клапан слива |
| 4. Предохранительный клапан | 16. Дисплей |
| 5. Датчик давления | 17. Индикатор аварийных сигналов |
| 6. Манометр | 18. Кнопка пуска и останова |
| 7. Выходной клапан | 19. Главный выключатель |
| 8. Адсорбционный осушитель | 20. Датчик температуры |
| 9. Встроенный охладитель | 21. Глушитель |
| 10. Отделитель конденсата | 22. Электромагнитный клапан слива конденсата |
| 11. Сушильная камера | 23. Обратный клапан |
| 12. Агрегат | 24. Соединитель |

Рис. 1: Компрессор с осушителем

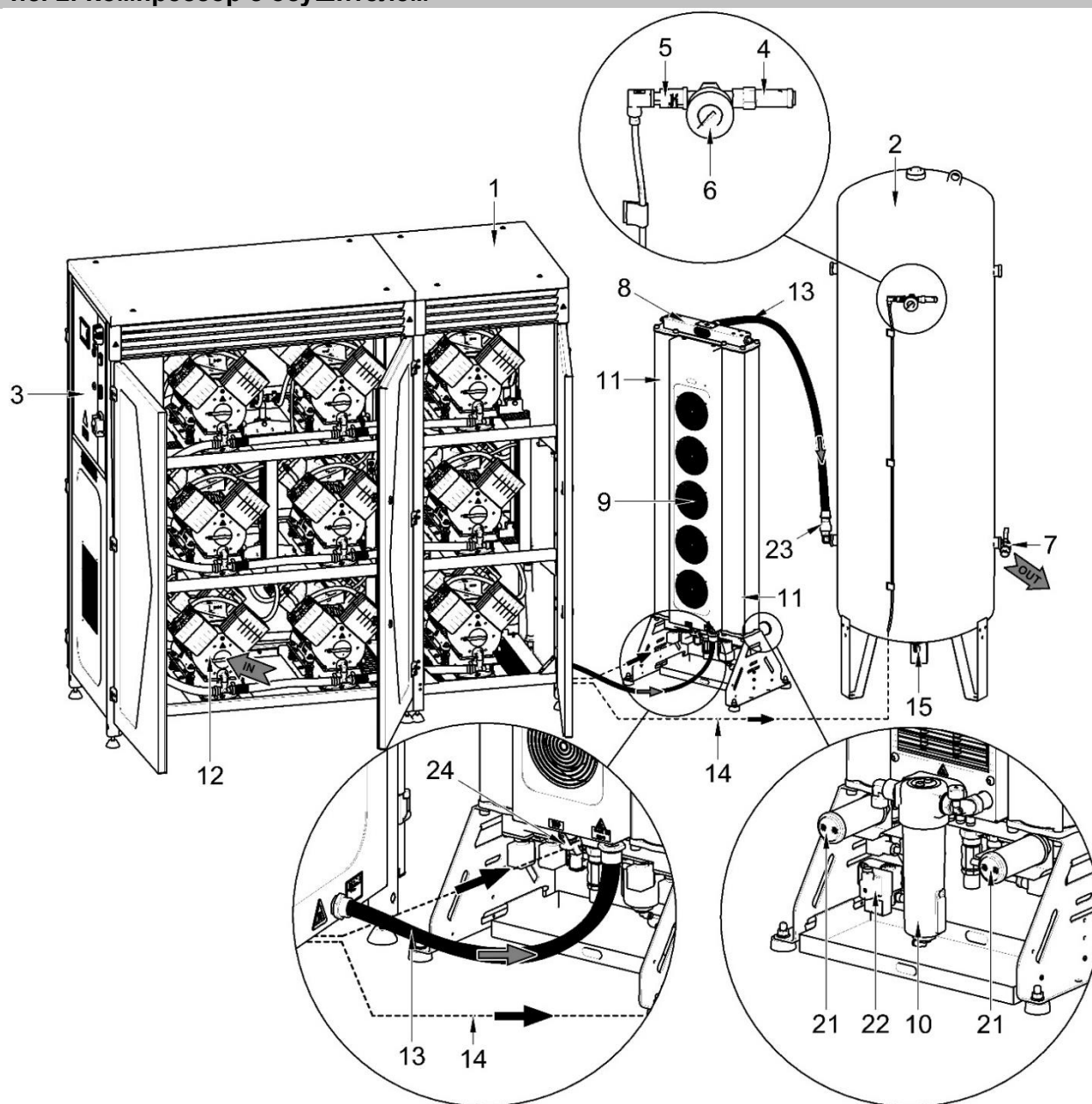


Рис. 2: Распределительный ящик и распределительный щит



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компрессоры предназначены для эксплуатации в сухих, проветриваемых и незапыленных помещениях при указанных ниже климатических условиях:

Температура от +5 до +40 °C

Относительная влажность макс. 70%

Рабочее давление 6 – 8 bar		DK50 9x4VRT/M		DK50 9x4VRTS/M
Номинальное напряжение, Частота		В, Гц	3x400, 50	3x400, 50
Производительность компрессора при давлении 6 бар (ПОСВ) при PDP	-20°C a)	л/мин	2050	2050
	-40°C a)	л/мин	1950	1950
Рабочее давление b)		бар	6,0 – 8,0	6,0 – 8,0
Номинальный ток		А	45	47
Категория защитного устройства главной цепи		А	50	50
Главная питающая линия		мм²	10	10
Корпус			IP10	IP30
Мощность двигателя		кВт	9x2.2kW	9x2.2kW
Объем ресивера		л	500	500
Качество воздуха (фильтрация)		µм	-	-
Максимальное рабочее давление предохранительного клапана		бар	10,0	10,0
Уровень шума при 5 бар (L _{pA})		дБ	≤ 82,5	≤ 72
Рабочий режим		%	S1-100	S1-100
Степень осушения PDP при давлении 7 бар d)		°C	≤-20	≤-20
			≤-40	≤-40
Время наполнения ресивера от 0 до 7 бар		с	74	74
Масса нетто c)		кг	717 ^{c)}	795 ^{c)}
Масса модуля компрессора		кг	532	610
Масса модуля осушителя		кг	63	63
Масса ресивера		кг	127	127
Размеры без упаковки Ш x Д x В		мм	3550x705x2100	3550x705x2100
Размеры модуля компрессора (Ш x Д x В)		мм	1840x620x1720	1840x675x1750
Размеры модуля осушителя AD 2250E		мм	530x350x1460	530x350x1460
Размеры ресивера (Ш x Д x В)		мм	770x705 x2100	770x705x2100
Требуемый оборот охлаждающего воздуха		м³/ч	3250	3250
Класс электробезопасности			Класс I	


^{a)} При заказе указывайте модель компрессора.

^{b)} Если необходим другой диапазон значений давления, проконсультируйтесь с поставщиком.

^{c)} Масса является ориентировочной и относится только к изделию без принадлежностей.

^{d)} Относится к температуре окружающего воздуха <30 °C, PDP — температура конденсации воздуха под давлением PDP.

Зависимость производительности компрессора от рабочего давления

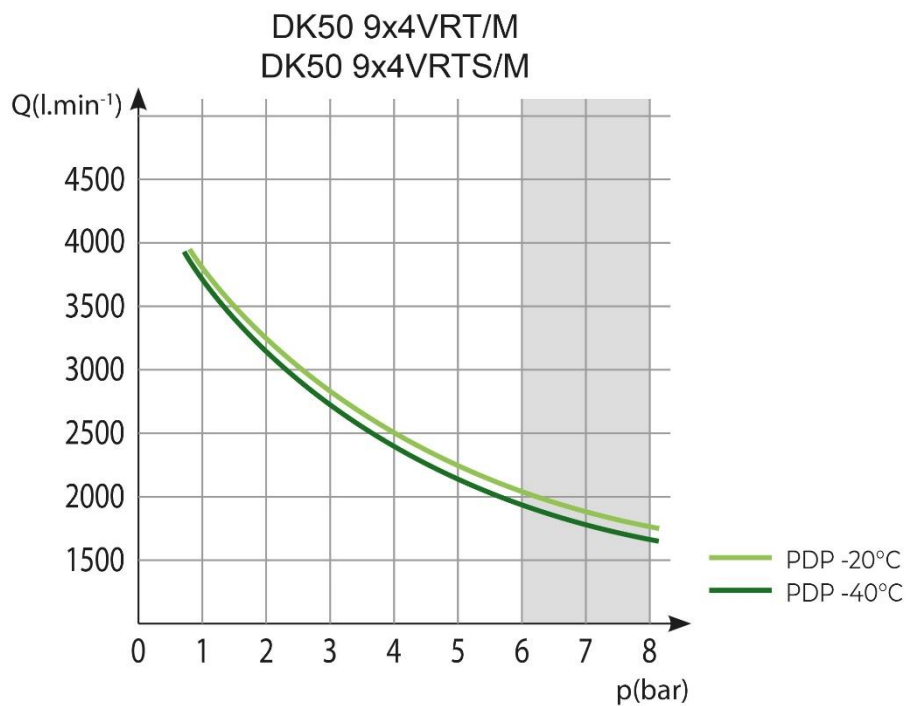

Рабочее давление 8–10 бар		DK50 9x4VRT/M		DK50 9x4VRTS/M
Номинальное напряжение, Частота		В, Гц	3x400, 50	3x400, 50
Производительность компрессора при давлении 8 бар (ПОСВ) при PDP	л/мин	l/min	1570	1570
	л/мин	l/min	1500	1500
Рабочее давление ^{b)}		бар	8,0 – 10,0	8,0 – 10,0
Номинальный ток		А	47	49
Категория защитного устройства главной цепи		А	50	50
Главная питающая линия		мм²	10	10
Корпус			IP10	IP30
Мощность двигателя		кВт	9x2.2kW	9x2.2kW
Объем ресивера		л	500	500
Качество воздуха (фильтрация)		μм	-	-
Максимальное рабочее давление предохранительного клапана		бар	11,0	11,0
Уровень шума при 5 бар (L _{pA})		дБ	≤ 82,5	≤ 72
Рабочий режим		%	S1-100	S1-100
Степень осушения PDP при давлении 7 бар ^{d)}	°C	≤-20	≤-20	
		≤-40	≤-40	
Время наполнения ресивера от 0 до 7 бар		с	74	74
Масса нетто ^{c)}		кг	717 ^{c)}	795 ^{c)}
Масса модуля компрессора		кг	532	610
Масса модуля осушителя		кг	63	63
Масса ресивера		кг	127	127
Размеры без упаковки Ш x Д x В		мм	3550x705x2100	3550x705x2100
Размеры модуля компрессора (Ш x Д x В)		мм	1840x620x1720	1840x675x1750
Размеры модуля осушителя AD 2250E		мм	530x350x1460	530x350x1460
Размеры ресивера (Ш x Д x В)		мм	770x705 x2100	770x705x2100
Требуемый оборот охлаждающего воздуха		м³/ч	3250	3250
Класс электробезопасности		Класс I		


a) При заказе указывайте модель компрессора.

b) Если необходим другой диапазон значений давления, проконсультируйтесь с поставщиком.

c) Масса является ориентировочной и относится только к изделию без принадлежностей.

d) Относится к температуре окружающего воздуха <30 °C, PDP — температура конденсации воздуха под давлением PDP.

Зависимость производительности компрессора от рабочего давления

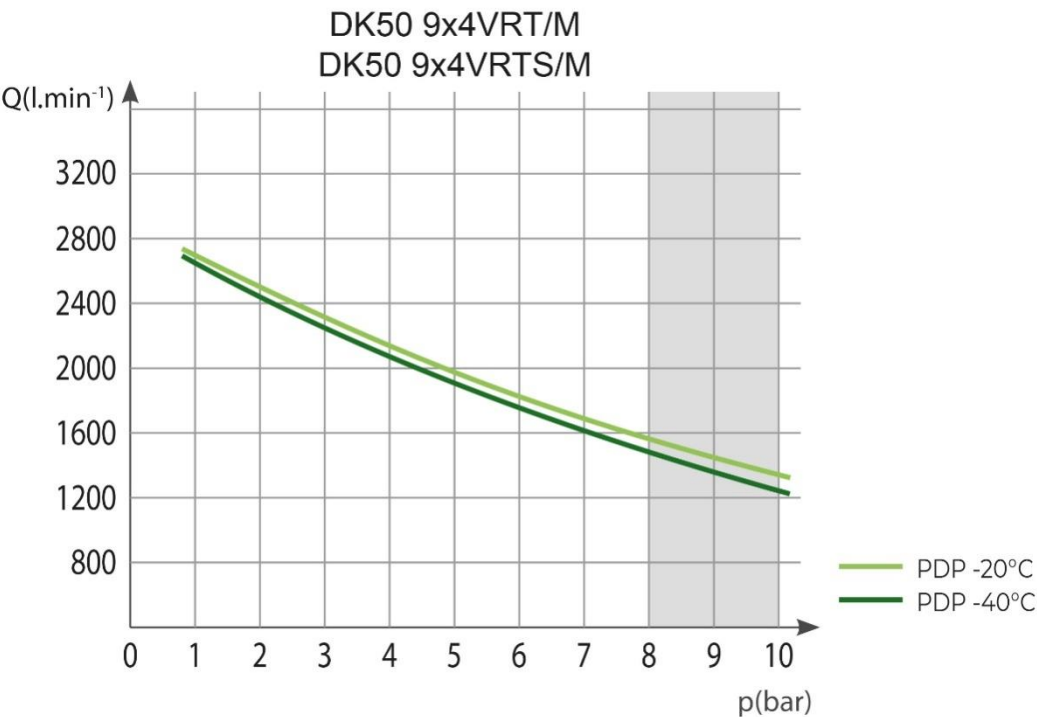

Поправки потребляемого объема сжатого воздуха за единицу времени (ПОСВ) вследствие подъема

Производительность, указанная как ПОСВ (потребляемый объем сжатого воздуха), зависит от выполнения следующих условий:

Высота	0 метров над уровнем моря	Температура	20 °C
Атмосферное давление	101 325 Па	Относительная влажность	0 %

Следующая таблица поправочных коэффициентов используется для преобразования производительности компрессора ПОСВ в зависимости от высоты над уровнем моря.:

Высота [метров над уровнем моря]	0–1500	1501–2500	2501–3500	3501–4500
Поправочный коэффициент ПОСВ	1	0,8	0,71	0,60

УСТАНОВКА



Риск неправильной установки.

Установку компрессора и ввод его в эксплуатацию должен выполнять только квалифицированный технический специалист. Этот специалист должен обучить представителей обслуживающего персонала эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Чтобы подтвердить установку и обучение операторов, необходимо внести запись в журнал установки оборудования. (См. гарантийный талон)

10. УСЛОВИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Компрессор можно устанавливать и эксплуатировать только в сухих, хорошо проветриваемых и чистых помещениях, условия окружающей среды в которых соответствуют требованиям, изложенным в разделе «Технические характеристики».



Опасность повреждения устройства.

Оборудование нельзя эксплуатировать на открытом воздухе или во влажных либо сырых средах.



Опасность взрыва.

Запрещается применять оборудование в помещениях с наличием взрывоопасных газов, пыли или воспламеняющихся жидкостей.

- Компрессор нужно устанавливать так, чтобы он был легкодоступным для эксплуатации и технического обслуживания. Убедитесь, что паспортная табличка устройства легкодоступна.
- Компрессор должен располагаться на плоской и устойчивой поверхности с учетом его массы (см. раздел «Технические

характеристики»).

- Компрессор со стороны оператора должен находиться на расстоянии не менее 70 см от стены, чтобы обеспечить поток воздуха для охлаждения и безопасность оператора и обслуживающего персонала.
- Примерно 70% электроэнергии, потребляемой агрегатами компрессора, переходит в тепло, и, следовательно, в помещениях, где установлен компрессор, должна быть предусмотрена дополнительная вентиляция для обеспечения достаточного воздухообмена в целях охлаждения (см. раздел «Технические характеристики»).



Опасность ожогов или возгорания. Внимание! Горячая поверхность!

Во время работы компрессора детали компрессора, осушителя и соединительные шланги между осушителем и компрессором могут нагреваться до опасных температур, что может повредить материалы или причинить вред обслуживающему персоналу.



Опасность высокой температуры

Запрещается устанавливать препятствия для воздушного потока перед охладителем или после него. Температура внутренних или внешних частей оборудования может повыситься до опасного уровня.



После первого ввода изделия в эксплуатацию какое-то время может быть замечен «запах новой техники». Этот запах вскоре исчезнет, и он никак не влияет на нормальную эксплуатацию изделия. После установки убедитесь, что место установки проветривается должным образом.

Выпускной воздуховод
сжатого воздуха

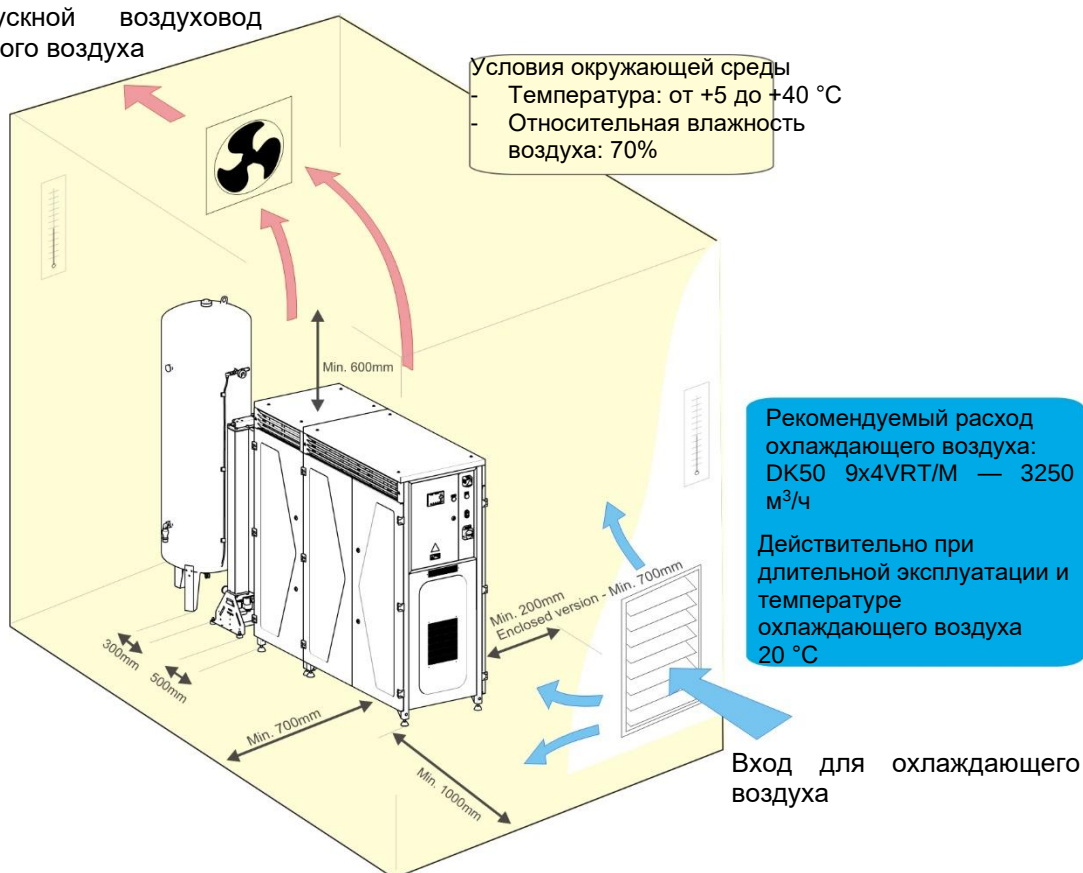


Рис. 3: Установка оборудования

11. КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА

11.1. Перемещение и выгрузка компрессора

- Извлеките компрессор (модуль компрессора, осушитель и ресивер) из упаковки и снимите транспортировочные фиксаторы с поддона. Все модули прикреплены к поддонам.

- Используйте погрузчик с вилочным захватом или аналогичное подъемное оборудование для погрузки/разгрузки и размещения изделия.
- Разместите модуль компрессора на месте установки (Рис. 4А).

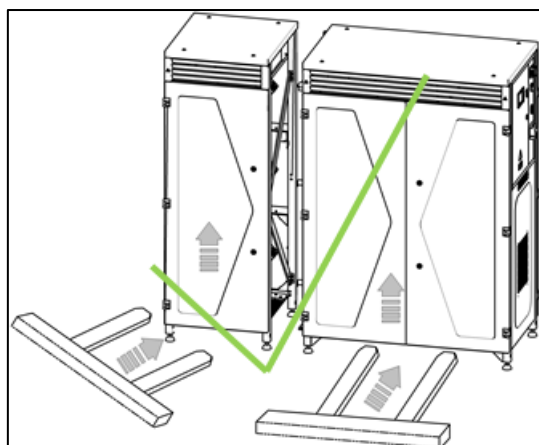
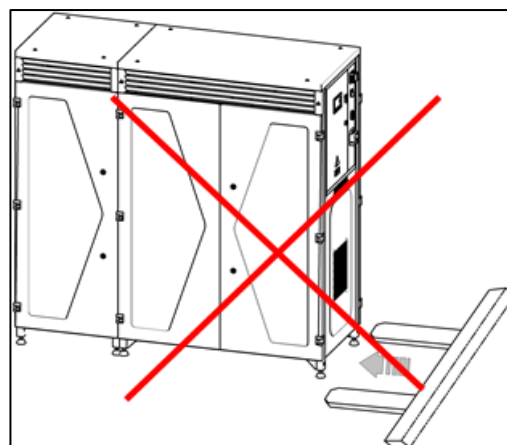
**А****В**

Рис. 4: Погрузка/разгрузка модуля компрессора

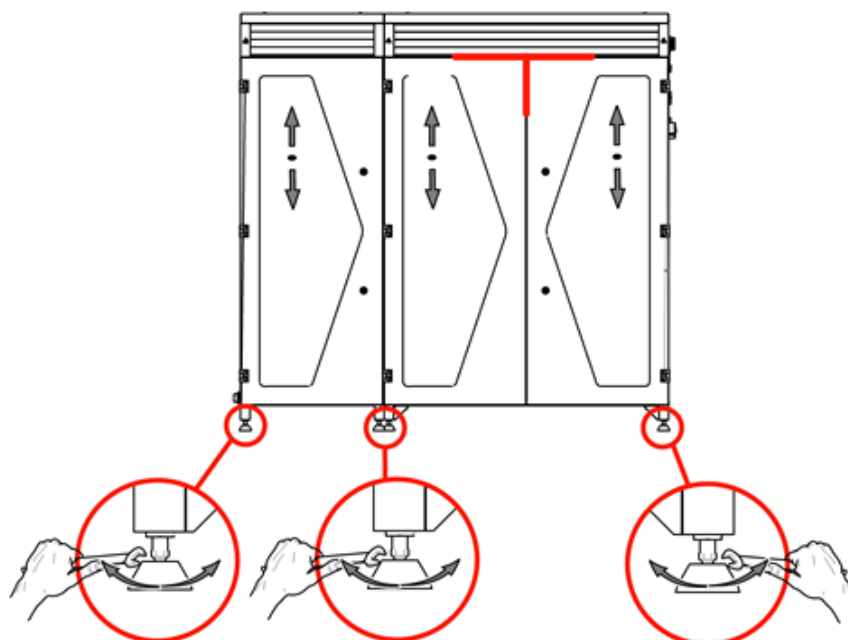


Рис. 5: Выравнивание компрессора по горизонтали

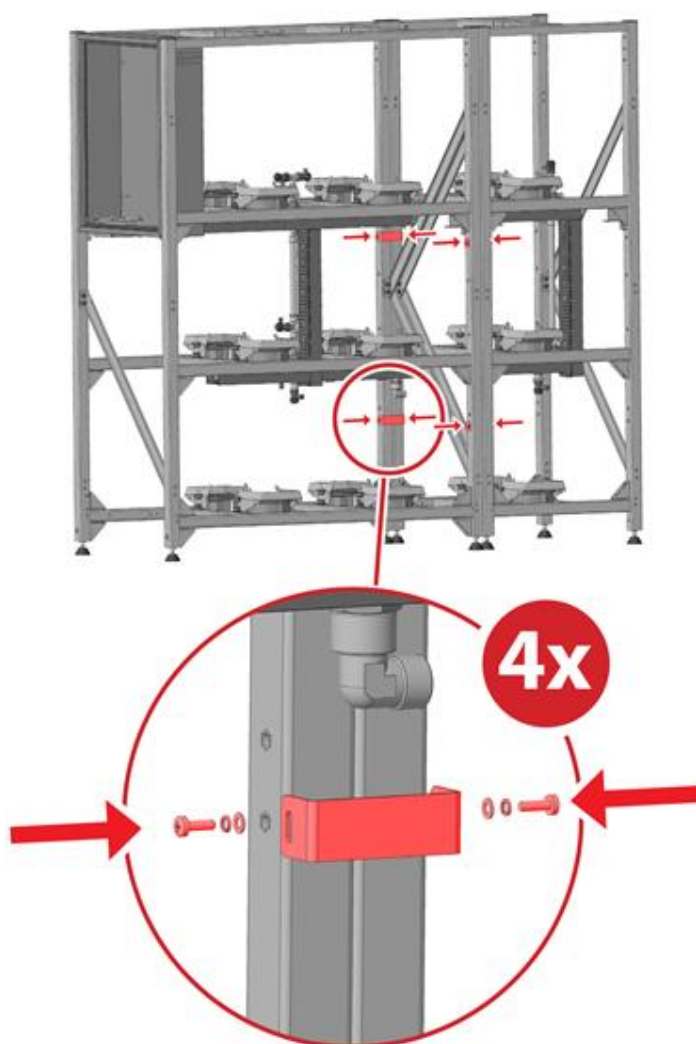


Рис. 6: Монтаж рамы



Перед установкой необходимо устранить все элементы упаковки и стабилизаторы, служащие для фиксации оборудования во время транспортировки, во избежание опасности повреждения изделия.

После окончательной установки и выравнивания компрессора на месте демонтируйте все приспособления, использовавшиеся для защиты агрегатов.

Электрическое подключение к электросети обеих рам соответствует физическому монтажу рам (6x4VRT и 3x4VRT). (Рис. 6)

Подключите двигатели M7-9 и вентиляторы E21-E26 к блоку контроллера, воспользовавшись соединителями Molex, установленными в кабельных каналах. (Рис. 7)

Подключение выполняется в следующем порядке:

Двигатель M7 (низ) + кабель W40 + кабель W43

Вентиляторы E21-22 + кабель W31 + кабель W34

Двигатель M8 (средний) + кабель W41 + кабель W44

Вентиляторы E23-24 + кабель W32 + кабель W35

Двигатель M9 (верх) + кабель W42 + кабель W45

Вентиляторы E25-26 + кабель W33 + кабель W36

Термостат В9 установлен на верхнем двигателе М9 и активирует вентиляторы при выключенных двигателях, когда температура превышает 40 °С. После снятия крышки подключите этот термостат с помощью кабеля W47 непосредственно к контактам термостата (без разъема).

Затем подключите обе рамы с помощью желто-зеленого соединительного провода, находящегося в нижней части обеих рам. (Рис. 8)


Рис. 7: Подключение двигателей М7, М8 и М9



Рис. 8: Уравнивание потенциалов рам




Рис. 9: Разъединение агрегатов

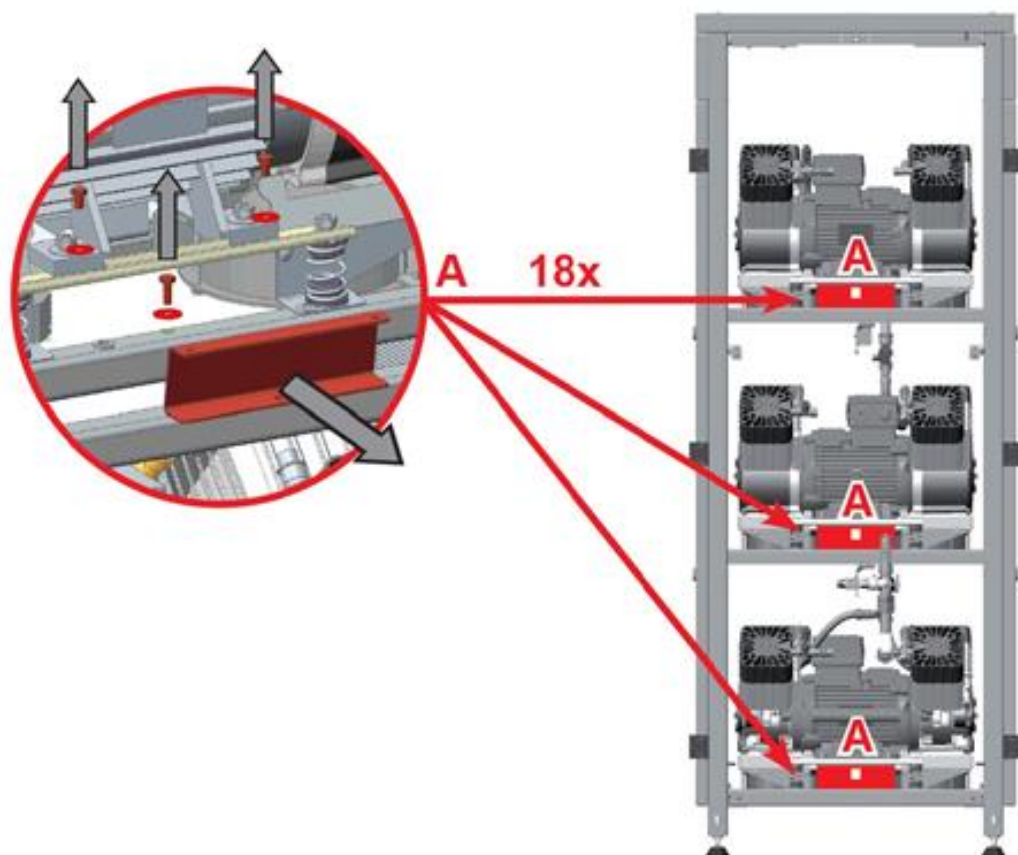

- Демонтируйте транспортировочные стабилизаторы с агрегатов (Рис. 9).
- DK50 9x4VRT/M – 18 подвесок.

Узел ресивера

Рис. 10: Перемещение ресивера

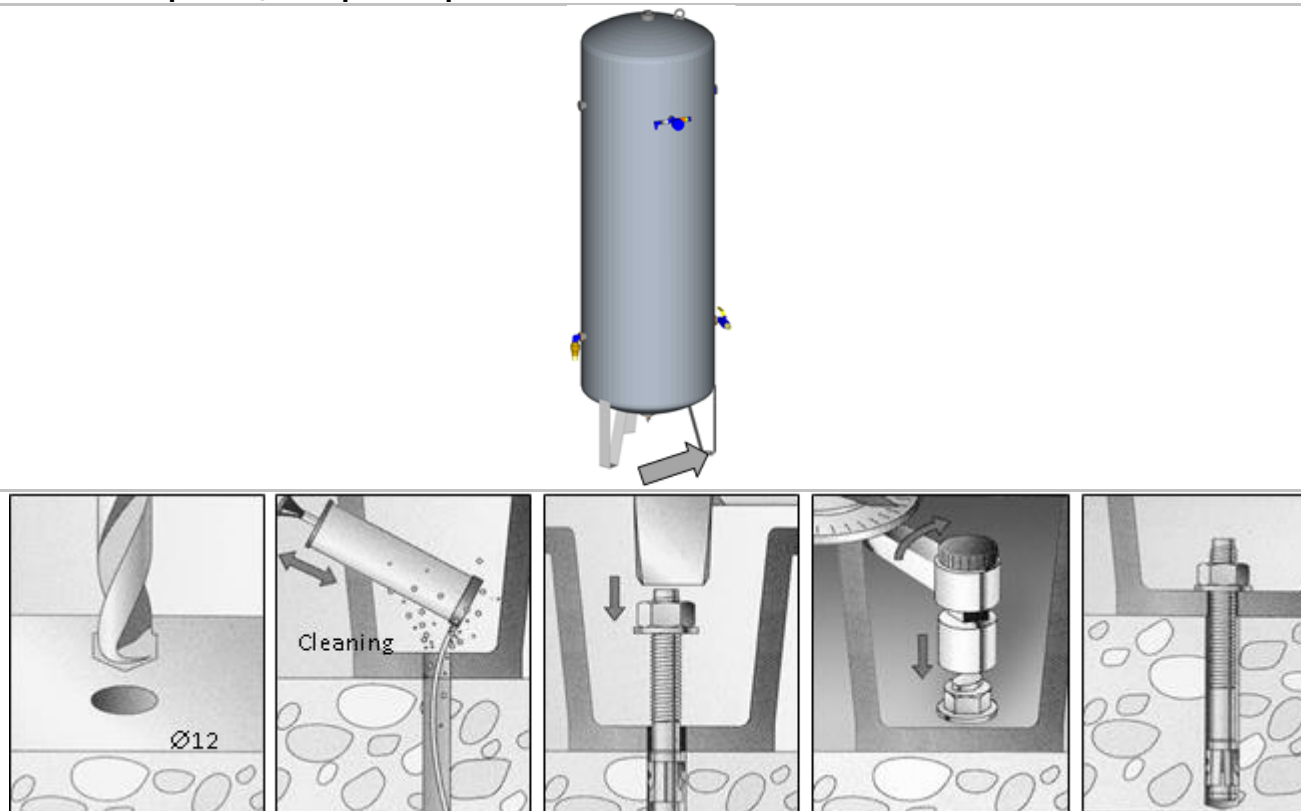

- Установите ресивер на предназначенное для него место и прикрепите его к полу! (Рис. 10)




Для перемещения оборудования требуется как минимум два человека.

Сборка адсорбционного осушителя

- Извлеките осушитель из упаковки.
- Установите осушитель в его рабочее положение (Рис. 11).

На нижних кронштейнах изделия установлены встроенные рукоятки. При перемещении оборудования каждый человек может схватить оборудование одной рукой за рукоятку, а второй — сзади камеры осушителя.

Рис. 11: Перемещение осушителя

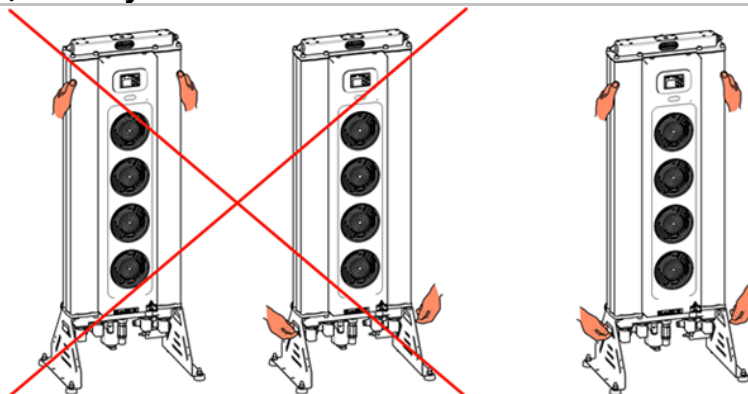

12. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подключите отдельные модули компрессора с помощью шланга (1)


длиной 500 мм, который входит в комплект поставки (Рис. 12)



Рис. 12: Подключение модулей компрессора

Соедините модуль компрессора, модуль осушителя и ресивер с помощью шлангов,


которые входят в комплектацию. (Рис. 13 - Рис. 14)

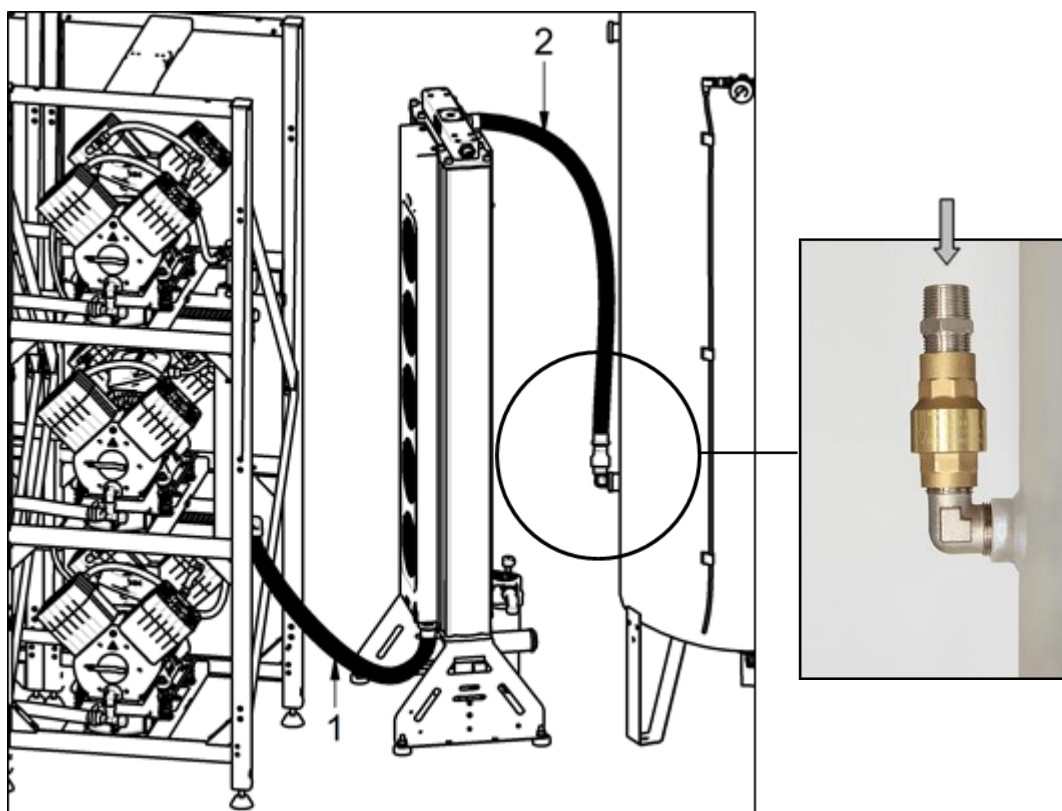

1 – Шланг 1300mm

2 – Шланг 1000mm

Рис. 13: Соединение модуля компрессора с корпусом осушителя и ресивера

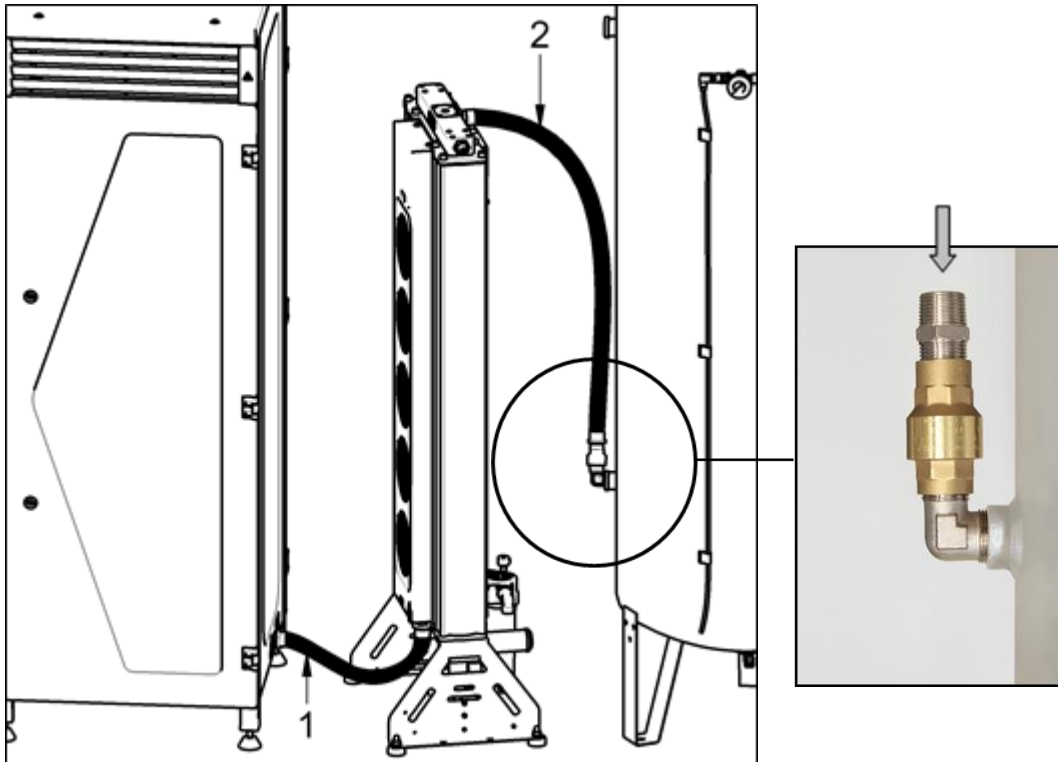

- 1 – Шланг 800mm
2 – Шланг 1000mm

Рис. 14: Соединение модуля компрессора с корпусом осушителя и ресивера

Вход сжатого воздуха на адсорбционном осушителе

- Присоедините выпускное отверстие сжатого воздуха компрессора (Рис. 15) ко входу осушителя (1).
- Установлено соединение G 1"

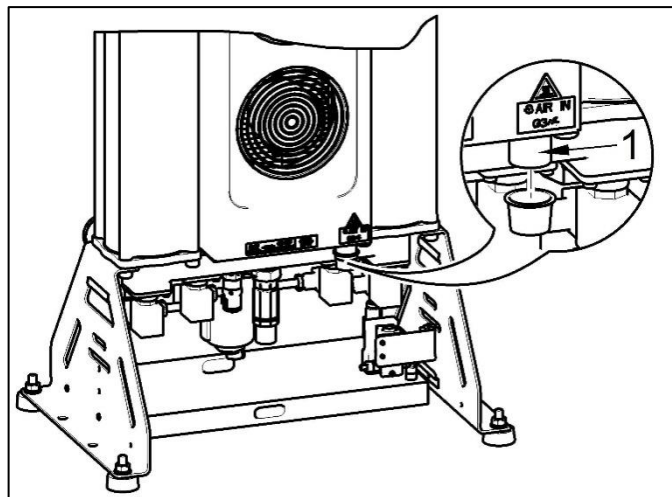


Рис. 15: Вход сжатого воздуха



Опасность ожогов или возгорания. Внимание! Горячая поверхность!

При установке соединительных шлангов на входе в осушитель воздуха, если они могут соприкасаться с оператором или другим материалом, убедитесь в том, что температура не опасная.

Выход сжатого воздуха на адсорбционном осушителе

- Присоедините выпускное отверстие осушителя (1) ко входу ресивера.
- Установлено соединение G 1".

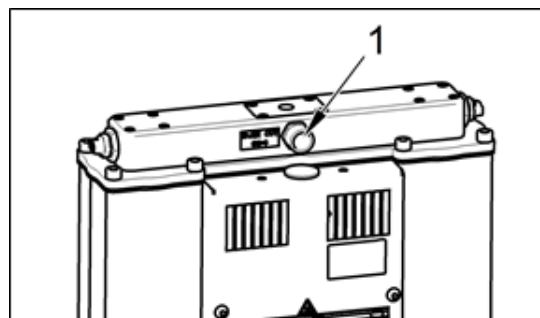


Рис. 16: Выход сжатого воздуха

Выход конденсата из осушителя

- Подсоедините шланг к выходу (1) из системы автоматического слива конденсата (2) и сливную патрубку

или предусмотренному резервуару для сбора конденсата.

При непосредственном подсоединении к сливной патрубке рекомендуется использовать глушитель.

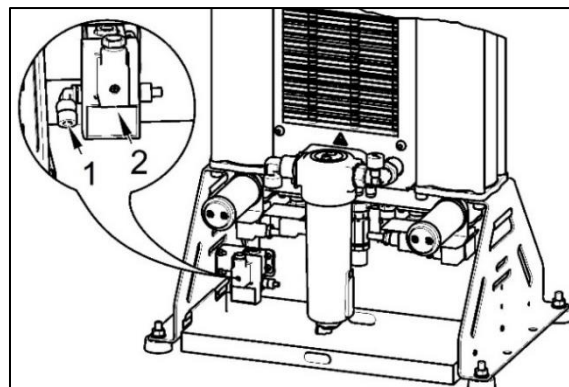
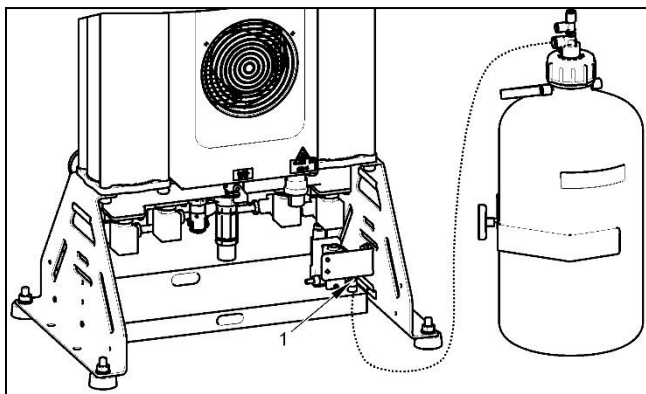


Рис. 17: Слив конденсата

На выходе сжатого воздуха из ресивера установлен шаровой клапан G 1".

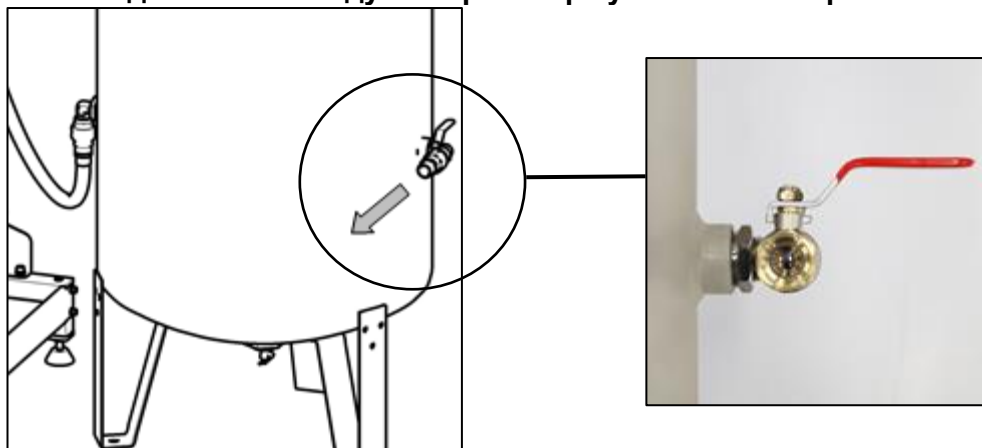


Рис. 18: Выход воздуха из ресивера



Возможно повреждение пневматических компонентов.

Убедитесь, что нет изгибов воздушных шлангов.

13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ



Опасность несанкционированного вмешательства.

К установке электрических комплектующих допускаются только квалифицированные электрики.



Опасность повреждения устройства.

Оператор обязан предусмотреть устройства защиты цепей для оборудования в соответствии с действующими техническими стандартами.



Оборудование поставляется без шнура питания.

- Подключите модуль компрессора к модулю осушителя с помощью кабеля W25. Кабель проложен через канал, проходящий по длине всего компрессора. (Рис. 19, Рис. 20).

- Подключите модуль компрессора к датчику давления В1, расположенному на ресивере, с помощью кабеля W23, заканчивающегося соединителем клапана. Кабель проложен через канал, проходящий по длине всего компрессора. (Рис. 21)

Производитель рекомендует защитить кабели, проходящие по полу (W25 и W23), с помощью кабельного моста.

- Подключите отдельные провода шнура питания к клеммам питания L1, L2, L3, N(BU), PE(GN/YE). (Рис. 23)
- Рекомендуемая конфигурация фазовых проводов: L1-BN, L2-BK, L3-GY.
- **Тип шнура (минимальные требования): H05 VV-F_5G10**
- Выведите шнур питания из корпуса, как показано на рисунке. (Рис. 22)

Рис. 19: Подключение компрессора к осушителю


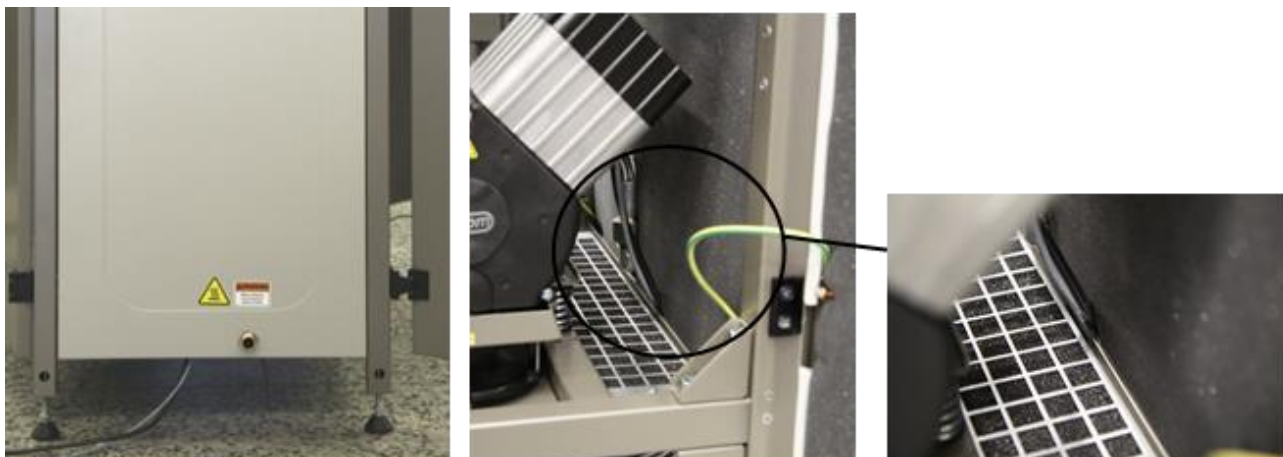


Рис. 20: Подключение к цепи сигнала управления

1. Разъем Harting



- Правильное прокладывание электрического кабеля к осушителю.

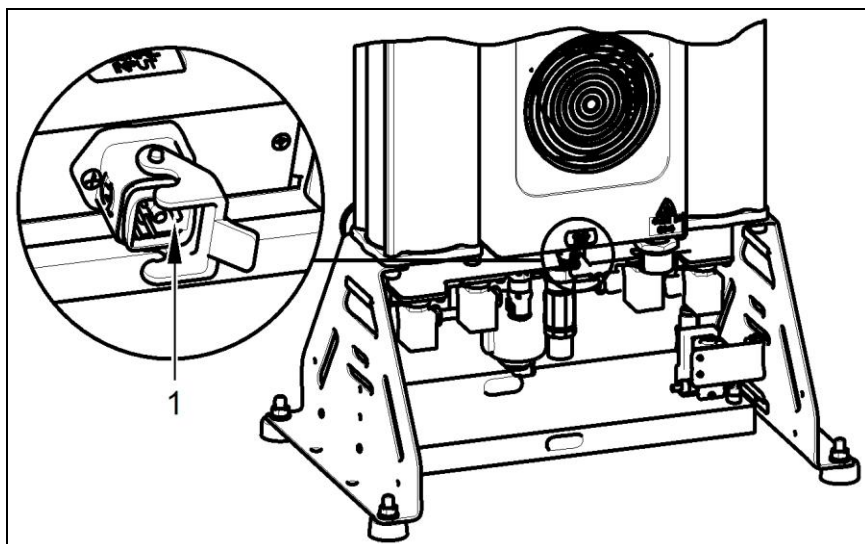

Опасность возгорания и поражения электрическим током.

Убедитесь в том, что электрический кабель не касается горячих частей устройства или соединительных шлангов.

Рис. 21: Подсоединение компрессора к датчику давления

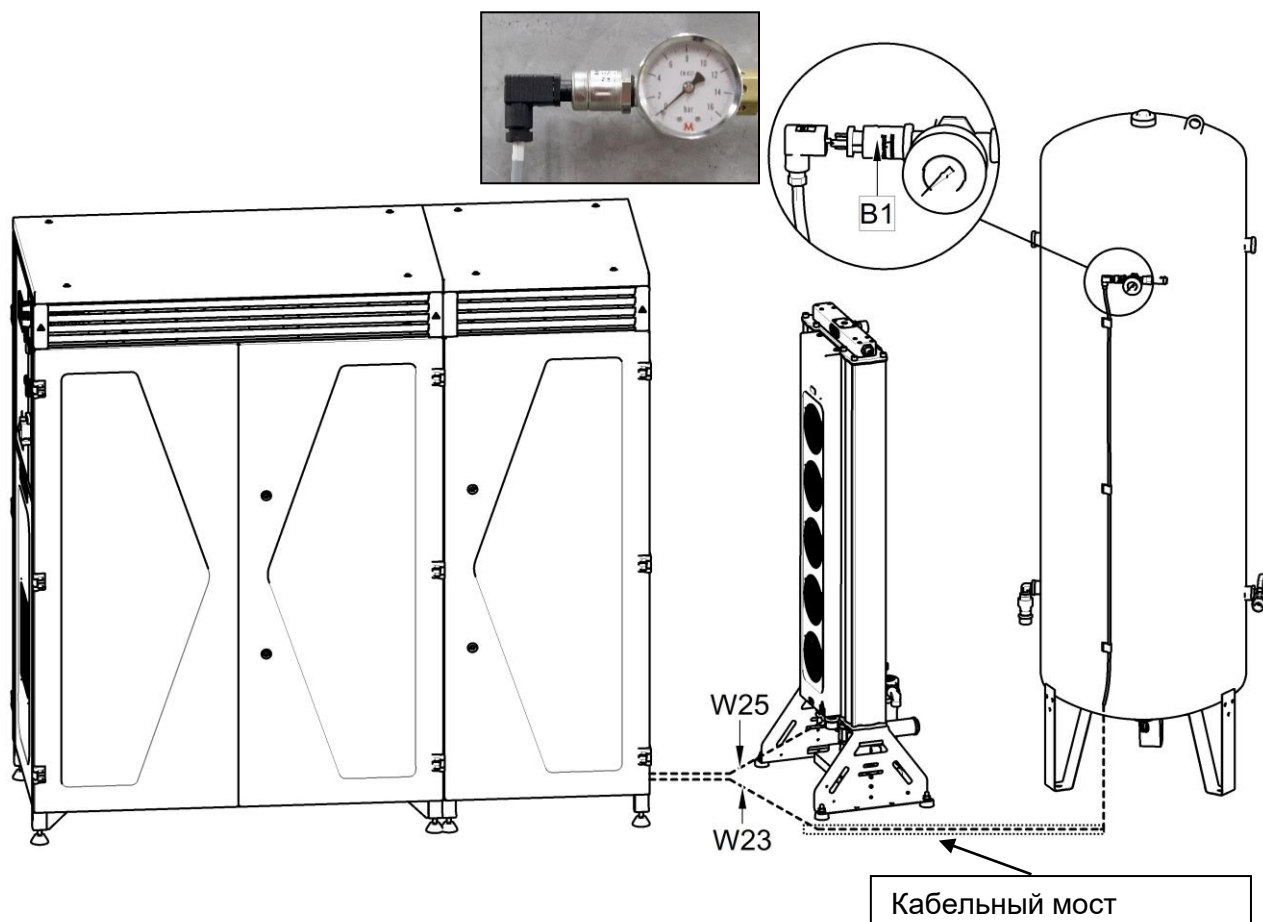


Рис. 22: Электрический кабель

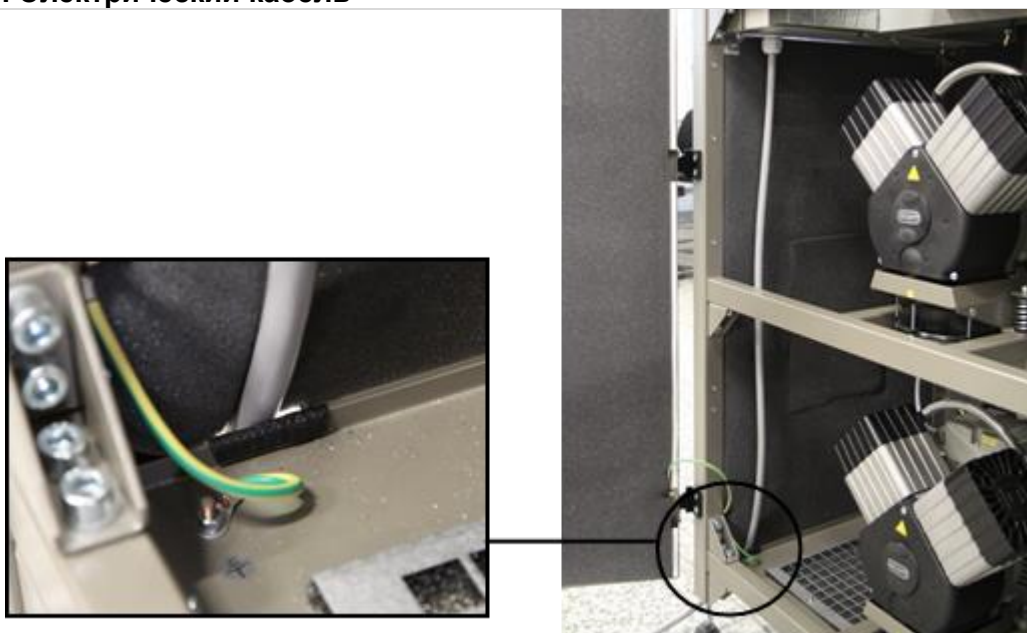
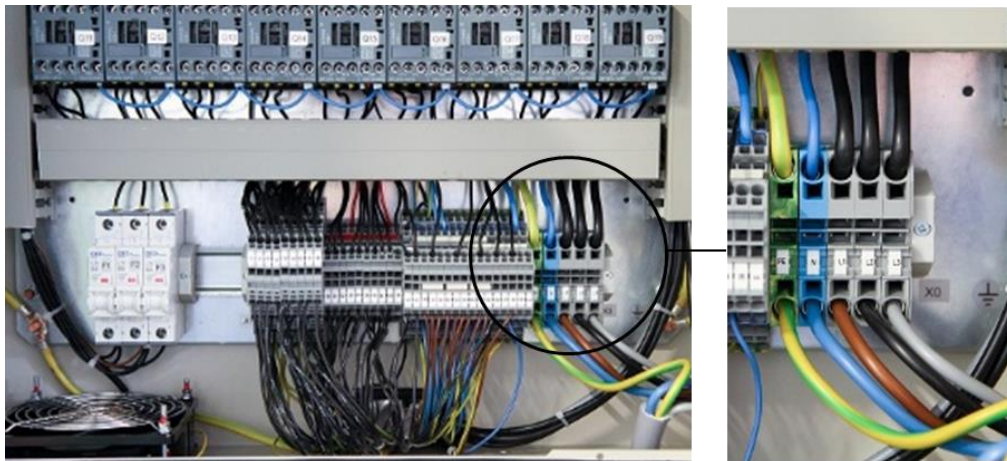


Рис. 23: Подключение шнура питания

Описание средств управления агрегатом

Управление агрегатами осуществляется в наборах по три исходя из реальной потребности в сжатом воздухе. Один из трех всегда задан как ведущее устройство DUTY (например, M1-3), а другие являются ведомыми устройствами, как STAND-BY1 (например, M4-6) и STAND-BY2 (например, M7-9). Ведомые наборы (STAND-BY) работают на следующих условиях (см. Рис. 24):


- Период ожидания (повышение

давления до верхнего предела) составляет 1 минуту при значительном расходе или 2 минуты при слабом расходе;

- Давление активации: менее 6,4 бара (для STAND-BY1), а затем менее 6,2 бара (для STAND-BY2);
- Неисправность двигателя в ведущей секции (DUTY).

Нижний предел настройки ROTATE составляет 50 часов, что позволяет обеспечить равномерную загрузку всех агрегатов.

Рис. 24: Средства управления агрегатом

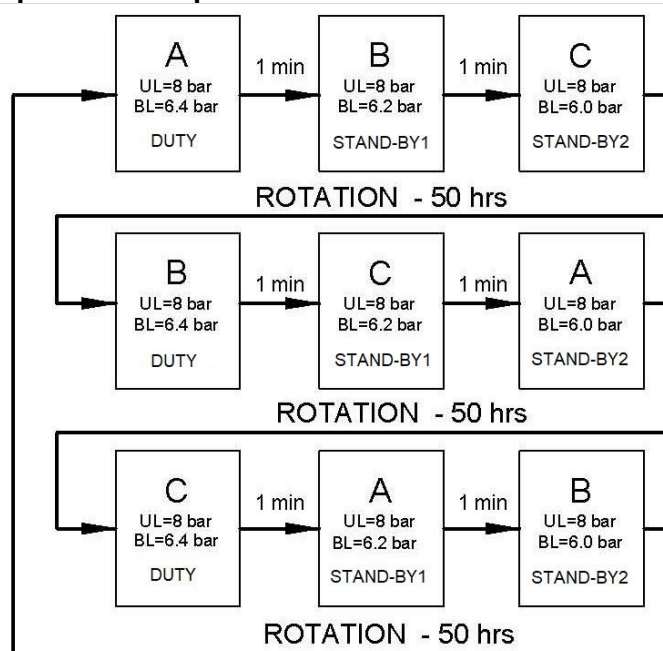

A – motors M1-M3

B – motors M4-M6

C – motors M7-M9

UL – upper limit


BL – bottom limit → Duty=6.4, Stand-by1=6.2, Stand-by2=6.0

Описание управления электромагнитным клапаном адсорбционного осушителя

Входные клапаны (входы А и В) переключаются каждые 120 секунд. Клапаны восстановления открываются по-разному, в зависимости от реальной нагрузки. Например, если все двигатели

активированы, продувка устанавливается на 110 с, если активируются два из трех наборов агрегатов (например, М1-6), продувка устанавливается на 84 с, и если активируются только три двигателя, продувка устанавливается на 37 с, см. схему (Рис. 25).

Рис. 25: Схема электромагнитного клапана

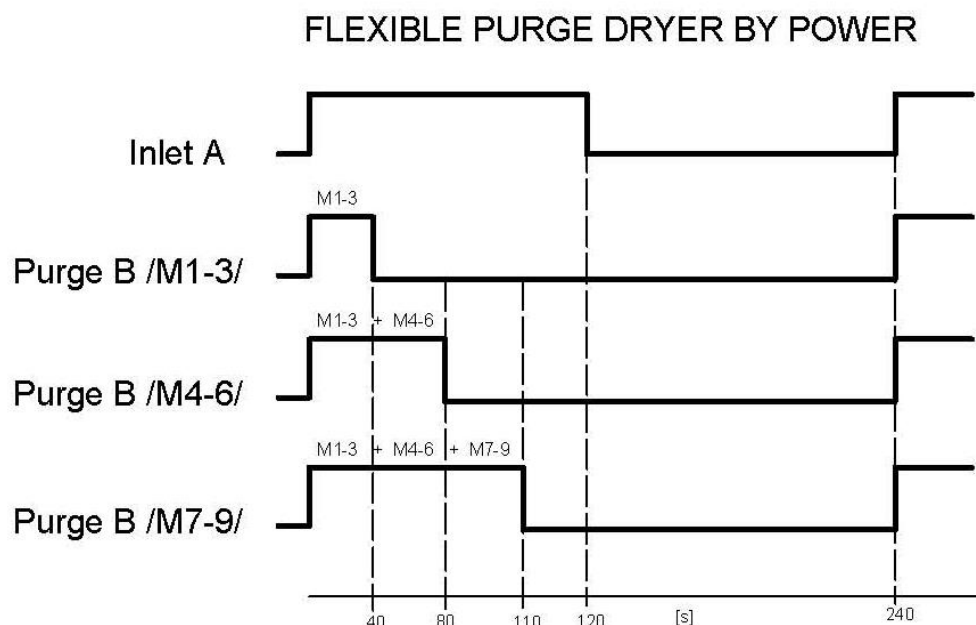

Соединение Ethernet (не требуется)

Компрессор может быть подключен к сети Ethernet 10/100 Мбит через контроллер следующим образом:

- 1 Чтобы подключить кабель к сети Ethernet, используйте разъем RJ-45 на дверце распределительного щита.
 - 2 Затем пользователь должен обратиться в ИТ-отдел с просьбой подключить компрессор к пользовательской сети Ethernet. IP-адреса оборудования по умолчанию: BM=192.168.0.3, TDE=192.168.0.2, подмаска =255.255.255.0.
 - 3 Пользователь должен запросить конфигурацию IP-адресов (конкретных или запрошенных) у производителя до отправки
- Откройте веб-браузер на ПК, смартфоне или планшете и введите IP-адрес контроллера (в данном случае 192.168.0.3).

компрессора.

- 4 Затем необходимо настроить IP-адреса (конкретные, запрошенные) согласно руководству (см. руководство по обслуживанию) или уточнить их в службе технической поддержки производителя компрессора.

Веб-сервер

Контроллер имеет встроенную функцию веб-сервера, которая обеспечивает мониторинг компрессора через ПК, смартфон или планшет с помощью обычного веб-браузера (Mozilla, Opera, Safari, Google Chrome и т. д.).

Ниже описан вход на веб-сервер после подключения компрессора к сети Ethernet.:



- Введите пароль «LOGO» и нажмите кнопку «Войти в систему».



- После входа в систему браузер отобразит первый экран с системной информацией для самого контроллера: поколение модуля, тип, прошивка (FW), IP-адрес и статус активности.



- Нажмите функцию «LOGO! BM» в браузере, чтобы отобразить текущий виртуальный статус экрана дисплея. Перемещайтесь по экрану с помощью кнопки ESC и кнопок со стрелками так же, как по обычному дисплею.



Мониторинг переменных памяти

Функция «LOGO! Variable» — другой вариант для мониторинга параметров компрессора с помощью выбранных переменных памяти. Нажмите кнопку «LOGO! Variable» на дисплее для отображения экрана, после чего используйте кнопку «Add Variable» (Добавить переменную), чтобы выбрать конкретные переменные памяти для мониторинга на основе данных производителя компрессора.

Переменные, назначенные в зависимости

от адресов и моделей, можно посмотреть в таблице «СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ» (см. раздел ПРИЛОЖЕНИЕ).

Выберите параметры переменной (в соответствии с приложением) последовательно в столбцах Range (Диапазон), Address (Адрес), Type (Тип) и Display Format (Формат отображения). Значения переменной отображаются в столбце Value (Значение). В результате таблица мониторинга может выглядеть так:

Variable							
Del	Range	Address	Type	Display Format	Value	ModValue	Modify
X	VM	0	DWORD	SIGNED	0		✓
X	VM	4	WORD	SIGNED	-250		✓
X	VM	6	WORD	SIGNED	-500		✓
X	VM	8	WORD	SIGNED	-500		✓
X	VM	10	DWORD	SIGNED	120000		✓
X	VM	14	DWORD	SIGNED	0		✓
X	VM	26	WORD	SIGNED	-50		✓
X	VM	28	WORD	SIGNED	0		✓

Add Variable Modify All Values

Примечание:


- Значения времени отображаются в минутах. Например, адрес 10 отображает значение 120 000 минут, что соответствует 2000

часов.

- Аналоговые значения (давление и температура) отображаются без десятичной запятой.

Выход из веб-сервера:

- Нажмите кнопку в левом верхнем углу.

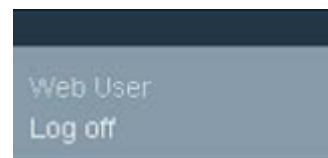

14. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

- Убедитесь, что сняты транспортные стабилизаторы.
- Проверьте все соединения шлангов сжатого воздуха.
- Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к сети и что подключены другие кабели (компрессор — осушитель и

компрессор — ресивер).


- Убедитесь, что выходной клапан находится в положении OFF (ВЫКЛ.)..



Компрессор не укомплектован резервным источником питания.

15. СХЕМА ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ

DK50 9x4VRT/M, DK50 9x4VRTS/M

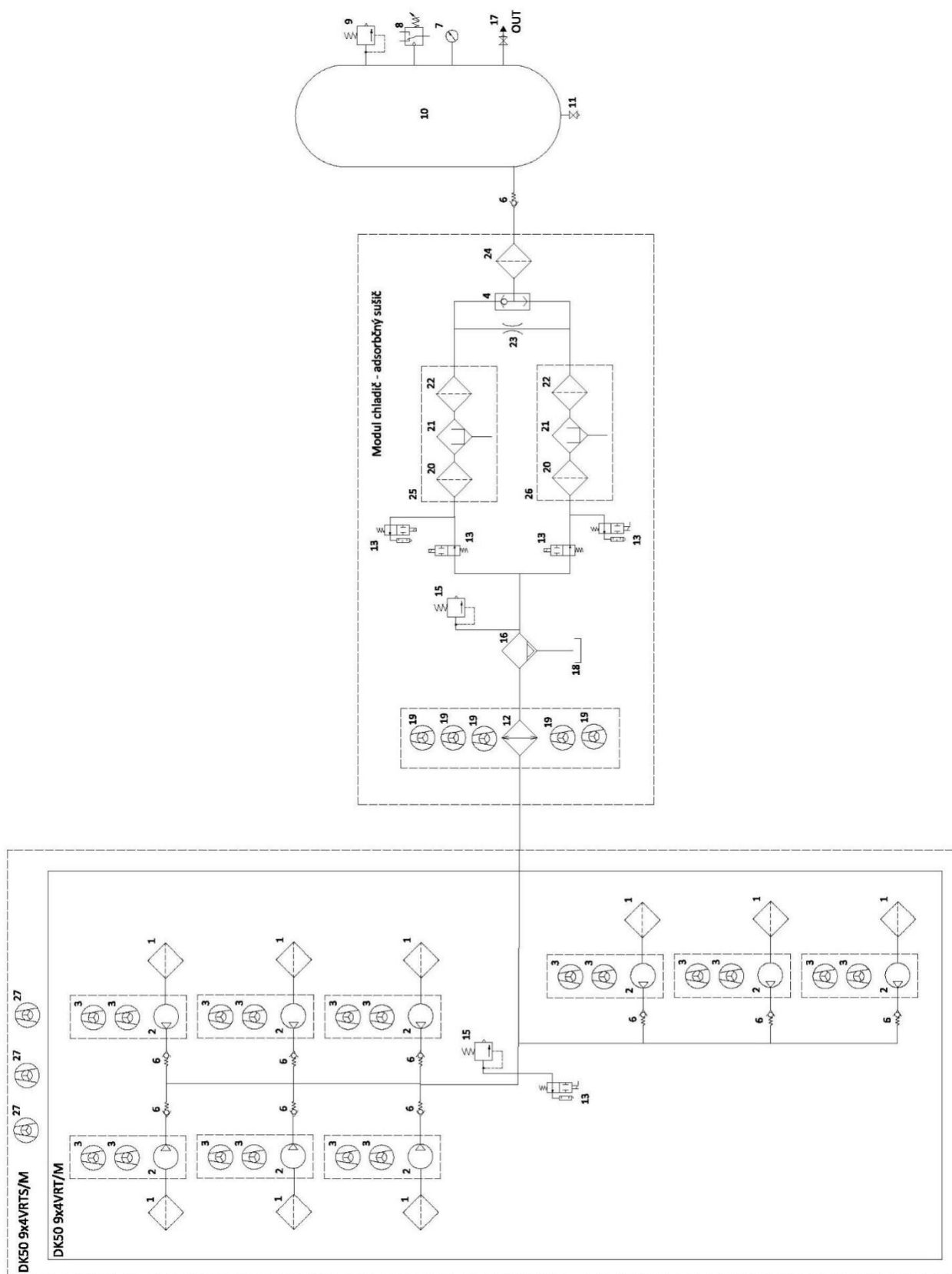

Условные обозначения на схеме циркуляции сжатого воздуха:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Всасывающий фильтр | 15. Клапан сброса избыточного давления |
| 2. Агрегат | 16. Отделитель конденсата |
| 3. Вентилятор компрессора | 17. Выходной клапан |
| 4. OR логический клапан | 18. Резервуар для сбора конденсата |
| 5. – | 19. Вентилятор охладителя |
| 6. Обратный клапан | 20. Входной фильтр камеры у |
| 7. Манометр | 21. Абсорбент / поглотитель влаги |
| 8. Датчик давления | 22. Выходной фильтр камер |
| 9. Предохранительный клапан | 23. Форсунка восстановления |
| 10. Ресивер | 24. Выходной фильтр |
| 11. Клапан слива конденсата | 25. Левая камера сушилki осушителя |
| 12. Охладитель | 26. Правая камера осушителя |
| 13. Электромагнитный клапан осушителя | 27. Центральный вентилятор |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

К РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ!



Опасность поражения электрическим током.

В экстренной ситуации отключите компрессор от электросети (выньте вилку сетевого шнура из розетки).



Опасность ожогов или возгорания.

Во время работы компрессора соединительный шланг между компрессором и осушителем и частями осушителя и агрегата может быть достаточно горячим, чтобы привести к ожогам персонала или повреждению другого материала.



Предупреждение: Компрессор управляется автоматически.

Автоматический запуск. Когда давление в ресивере понижается до нижнего предела, компрессор автоматически включается. Компрессор автоматически выключается, когда давление в ресивере достигает уровня отключения.



Возможно повреждение пневматических компонентов.

Параметры рабочего давления для реле давления, заданные производителем, невозможно изменить. Работа компрессора при рабочем давлении ниже уровня включения свидетельствует о большом потреблении воздуха подключенным устройством (см. раздел «СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ»).



Опасность повреждения осушителя.

Может произойти повреждение осушителя, если эксплуатировать его при температуре окружающего воздуха выше его максимального рабочего давления, указанного в разделе «Технические характеристики».



Необходимая степень осушения воздуха достигается только при указанных условиях эксплуатации.

Степень осушения воздуха (и, соответственно, температура конденсации) снижается, если рабочее давление не достигает минимального.



При длительной работе компрессора температура внутри моделей с корпусом может превысить 40 °C. При этом автоматически включаются охлаждающий вентилятор в корпусе и вентилятор компрессора. Вентиляторы останавливаются автоматически, когда температура окружающего пространства опускается ниже 32 °C.

16. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

- Переведите главный выключатель (19) на распределительном щите в положение «I». (Рис. 2). Начинает светиться белый индикатор Р1 (17), компрессор находится в режиме

останова, а на дисплее (16), который находится на дверце распределительного щита, отображается следующее сообщение:

Первая строка отображает номер версии программного обеспечения.

RUN HOURS: среднее значение часов эксплуатации

PRESSURE: текущее давление

TEMP_OUT: температура окружающего воздуха

D	K	5	0	9	x	4	V	R	T	/	M	V	2	.	0	3
				S	T	O	P									
				P	U	S	H		"	S	T	A	R	T	"	
				P	R	E	S	S	U	R	E			5	.	9
														8		b
															a	r
R	U	N		H	O	U	R	S						0		h
															r	s
T	E	M	P	_	O	U	T							2	2	.
														5		°C

- Нажмите кнопку START (СТАРТ) (18) на распределительном щите. (Рис. 2)

На дисплее отобразится следующая информация:

PRESSURE: текущее давление в системе

TEMP_OUT: температура окружающего воздуха

В третьей строке выводится любой активную продувку

STAND BY MODE (Режим ожидания) или RUN MODE (Режим эксплуатации)

RUN HOURS: среднее значение часов эксплуатации

Time-To-Go MTN : показывает время до следующего технического обслуживания компрессора

P	R	E	S	S	U	R	E					6	.	3	2		b	a	r
T	E	M	P	_	O	U	T					2	2	.	5		°C		
																	P	U	R
																	G	E	-
																	B		
																	R	U	N
																	M	O	D
																	E		
																	R	U	N
																	H	O	U
																	R	S	:
																			0
T	i	m	e	-	T	o	-	G	o										
																	M	T	N
																	2	0	0
																	0		

Нажатие START активирует агрегаты компрессора по три, в зависимости от нагрузки, см. Рис. 24.

Датчик давления следит за давлением в ресивере.

Агрегаты функционируют в автоматическом режиме и включаются/выключаются (см. раздел о рабочем давлении в главе «Технические характеристики») при помощи

контроллера в зависимости от расхода сжатого воздуха. Компрессоры последовательно выключаются после достижения давления переключения.

Двигатели можно отключить с помощью кнопки STOP (СТОП) (18), после чего на дисплее отобразится начальный экран.

Примечание. Кнопка START имеет заданный параметр RETENTIVITY = ON: это означает, что если работа

компрессора была запущена нажатием кнопки START, система запомнит эту операцию, и после выключения компрессора или в случае отключения его от электропитания для запуска компрессора нет необходимости нажимать кнопку START.

Нормальная эксплуатация

Агрегаты функционируют в автоматическом режиме, включаясь и выключаясь в зависимости от потребления

сжатого воздуха. Когда давление в ресивере падает до уровня давления переключения, компрессоры автоматически включаются в определенной последовательности. Благодаря этому обеспечивается поступление требуемого давления в ресивер за максимально короткое время.

Во время нормальной эксплуатации на дисплее отображаются экраны:

- Двигатели включены

PRESSURE - текущее рабочее давление
TEMP_OUT - температура окружающего воздуха

В третьей строке выводится любой активную продувку

RUN MODE – все агрегаты включены

RUN HOURS - среднее значение часов эксплуатации

TIME-TO-GO MN - показывает время до следующего технического обслуживания компрессора.

P	R	E	S	S	U	R	E		6	.	3	2		b	a	r															
T	E	M	P	_	O	U	T		2	2	.	5		°	C																
									P	U	R	G	E	-	B																
									R	U	N			M	O	D	E														
									R	U	N			H	O	U	R	S	:									0			
T	i	m	e	-	T	o	-	G	o		M	T	N															2	0	0	0

- Двигатели выключены

PRESSURE - текущее рабочее давление
TEMP_OUT - температура окружающего воздуха

В третьей строке выводится любой активную продувку

STANDBY MODE – все агрегаты выключены

RUN HOURS - среднее значение часов эксплуатации

TIME-TO-GO MN - время до следующего сеанса технического обслуживания (в часах).

P	R	E	S	S	U	R	E		1	0	.	3	2		b	a	r			
T	E	M	P	_	O	U	T		2	2	.	5		°	C					

SECTION_A - часы эксплуатации агрегата M1 / секция A /

SECTION_B - часы эксплуатации агрегата M2 / секция B /

SECTION_C - часы эксплуатации агрегата M7 секция C /

AVERAGE HRS - усредненные часы эксплуатации - $(M1 + M2 + M7) / 3$

O P E R A T I N G H O U R S									
S E C T I O N _ A :								0	h
S E C T I O N _ B :								0	h
S E C T I O N _ C :								0	h
A V E R A G E H R S :								0	

Датчик давления следит за давлением в ресивере. На дисплее отображается величина давления.



Проверьте все соединения на линии подачи воздуха и наличие утечек сжатого воздуха. Устраните все обнаруженные утечки.

Медленно откройте выпускной клапан, переведя его в положение ON (ВКЛ.). Компрессор запускается и работает до тех пор, пока давление во всей системе сжатого воздуха не стабилизируется. Затем агрегаты постепенно выключаются при давлении переключения.

Внесите запись о монтаже и вводе в эксплуатацию компрессорной установки (см. раздел «Приложение»).

Выключение компрессора

Чтобы отключить компрессоры, нажмите кнопку STOP (СТОП) (18).

16.1. Контроллер: эксплуатация и аварийные сигналы

Контроллер следит за агрегатами, контролирует их работу, анализирует

ошибки, сообщает об аварийных сигналах и необходимости провести техническое обслуживание после определенных интервалов.

Контроллер оценивает температуру окружающего воздуха, внутреннюю температуру компрессора, рабочее давление и часы эксплуатации.

Значения, аварийные сигналы и сведения об интервалах обслуживания отображаются на дисплее. Температуры выше критических значений отображаются как аварийные сигналы.

Панель управления имеет четыре кнопки перемещения курсора ▲, ▼, ►, ◀, кнопки ESC и OK, а также четыре функциональные кнопки (F1–F4), которые отвечают за указанные ниже функции:

F1 - При появлении аварийного сообщения эта кнопка позволяет перевести дисплей в нормальный режим на 60 секунд. Фоновая подсветка экрана.

F2 - отображение информации о часах эксплуатации и интервалах технического обслуживания.

T O T A L H O U R S :								0	h
S E C T I O N _ A :								0	h
S E C T I O N _ B :								0	h
S E C T I O N _ C :								0	h
T I M E - T O - G O M T								2 0 0 0	h
N U M B E R o f M T :								0	x

F3 – прокручивает:

- неисправности двигателя
- количество пусков двигателя
- максимальные температуры

F A I L U R E S											
M O T . S T A R T E R / C O U N T E R /											
M 1 :				0			M 2 :				0
M 3 :				0			M 4 :				0
M 5 :				0			M 6 :				0

F A I L U R E S											
M O T . S T A R T E R / C O U N T E R /											
M 7 :				0							
M 8 :				0							
M 9 :				0							

N U M B E R											
O F S W I T C H I N G :											
M O T O R _ 1 :									1	x	
M O T O R _ 2 :									1	x	
M O R O R _ 7 :									1	x	

M A X I M A L T E M P E R A T U R E :											
T E M P _ O U T :										2 3 °C	
T E M P _ I N :										0 °C	
O U T :								0 x			0 h
I N :								0 x			0 h
T H E R M O S T _ B 2 :										O F F	

F4 - КНОПКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (по завершении технического обслуживания нажать и удерживать 5

секунд, чтобы сбросить интервал обслуживания длительностью 2000 ч).

Примечание. При нажатии кнопок F1–3 на панели управления на 30 секунд

включается фоновая подсветка экрана.

Работа оборудования

Дисплей нормального рабочего режима отображается во время работы оборудования. Функциональные кнопки

используются для отображения указанной ниже информации:

Кнопка F2:

SECTION_A - часы эксплуатации секции A / M1 /

SECTION_B - часы эксплуатации секции A / M2 /

SECTION_C - часы эксплуатации секции A/M7/

AVERAGE HRS - усредненные часы эксплуатации.

TIME-TO-GO MN - время до следующего сеанса технического обслуживания

TOTAL HOURS: - общее количество часов эксплуатации компрессора

NUMBER of MN – количество завершённых сеансов технического обслуживания, подтвержденное нажатием кнопки F4.

Через 10 секунд дисплей возвращается в исходное состояние.

T	O	T	A	L		H	O	U	R	S	:					0		h		
																0		h		
																0		h		
																0		h		
																0		h		
T	I	M	E	-	T	O	-	G	O		M	T				2	0	0	0	h
N	U	M	B	E	R														0	x

Кнопка F3:

Позволяет перемещаться между различными вспомогательными экранами. Например, можно отобразить количество токовых перегрузок двигателей M1–M9, при которых прерыватель цепи отключает двигатель от электросети. Чтобы устранить неполадку, необходимо вручную перевести прерыватели сети в положение ON (ВКЛ.).

Через 10 секунд дисплей возвращается в исходное состояние.

M	O	T	.	S	T	A	R	T	E	R	/	C	O	U	N	T	E	R	/	
M	1	:						0				M	2	:					0	
M	3	:						0				M	4	:					0	
M	5	:						0				M	6	:					0	

M	O	T	.	S	T	A	R	T	E	R	/	C	O	U	N	T	E	R	/	
M	7	:						0												
M	8	:						0												
M	9	:						0												

	NUMBER											
	OF SWITCHING :											
	MOTOR _ 1 :										1	x
	MOTOR _ 2 :										1	x
	MOROR _ 7 :										1	x

Кнопка F4:

Кнопка F4 активна, только если на дисплее отображается экран технического обслуживания по истечении 2000 ч эксплуатации (см. сигналы технического обслуживания). Нажмите и удерживайте кнопку F4 не менее 5 секунд, чтобы задать новый интервал. Как только задан новый интервал обслуживания, дисплей возвращается в нормальный рабочий режим.

Примечание. Только обслуживающий персонал уполномочен задавать новый интервал обслуживания с помощью кнопки F4.

S	E	R	V	I	C	E		A	C	C	O	R	D	I	N	G		t	O
I	N	S	T	R	U	C	T	I	O	N	S		f	O	R		U	S	E
							</												

Аварийные сигналы



Оборудование оснащено интеллектуальной системой мониторинга, подающей аварийные сигналы на основе их приоритетов (сигналы со средним приоритетом важнее сигналов с низким).



Аварийный сигнал имеет более высокий приоритет, чем сигнал о необходимости технического обслуживания.

Интервал технического обслуживания измеряется от первой подачи напряжения к оборудованию. Все аварийные сигналы сопровождаются мигающим красным сигнальным индикатором P2.

Условия подачи аварийных сигналов с низким приоритетом

- Истечение определенного интервала технического обслуживания.

Этот аварийный сигнал активируется, когда истекает интервал технического обслуживания длительностью 2000 ч. На дисплее отображается следующая информация:

SERVICE ACCORDING TO INSTRUCTION FOR USE /

(Обслуживание в соответствии с инструкциями по эксплуатации)

TOTAL HOURS - общее время, в течение которого оборудование было подключено к электросети
 RUN HOURS – среднее часы эксплуатации оборудования
 Дисплей начнет мигать оранжевым.

Примечание. Чтобы перевести дисплей в нормальный режим на 60 секунд, нажмите кнопку F1.

S	E	R	V	I	C	E	A	C	C	O	R	D	I	N	G	t	O
I	N	S	T	R	U	C	T	I	O	N	S	f	O	r	U	S	E
T	O	T	A	L	H	O	U	R	S	:						0	h
																0	h
S	E	T	U	P	N	E	W	I	N	T	E	R	V	A	L	:	
H	O	L	D	F	4	L	E	A	S	T	5	s	e	c			

Компрессор подает воздух в систему подачи сжатого воздуха по мере необходимости и без ограничений.

Для проведения необходимого обслуживания обратитесь к квалифицированному персоналу.

Примечание. Только обслуживающий персонал уполномочен задавать новый интервал обслуживания.

Нажмите и удерживайте кнопку F4 не менее 5 секунд, чтобы подтвердить завершение сеанса технического обслуживания.

Дисплей вернется в нормальный рабочий

режим.

Это означает, что с текущего момента на контроллере был установлен новый интервал обслуживания.



Любые работы по техническому обслуживанию должны регистрироваться в журнале обслуживания компрессора.

- Температура воздуха вокруг модуля компрессора превышает предельное значение.

WARNING - сигнал о высокой температуре окружающего воздуха.

Дисплей начнет мигать оранжевым.

Этот аварийный сигнал появляется, если окружающая температура превышает предельное значение 40 °C как минимум в течение 30 секунд. Агрегаты функционируют нормально.

В остальных случаях на дисплее отображена текущая температура окружающего воздуха.

Когда температура опускается ниже предельного значения, этот аварийный сигнал исчезает.

Компрессор подает воздух в систему подачи сжатого воздуха по мере необходимости и без ограничений.

- Температура внутри модуля компрессора превышает предельное значение.

WARNING - сигнал о высокой температуре внутри компрессора с корпусом. Дисплей начнет мигать оранжевым.



Этот аварийный сигнал появляется, если температура внутри компрессора с корпусом превышает предельное значение 70 °C как минимум в течение 30 секунд. Агрегаты функционируют нормально.

Примечание. Для компрессоров без корпуса не предусмотрена функция контроля внутренней температуры.

На дисплее отображается текущая температура внутри модуля компрессора с корпусом.

Когда температура опускается ниже предельного значения, этот аварийный сигнал исчезает.

Компрессор подает воздух в систему подачи сжатого воздуха по мере необходимости и без ограничений.

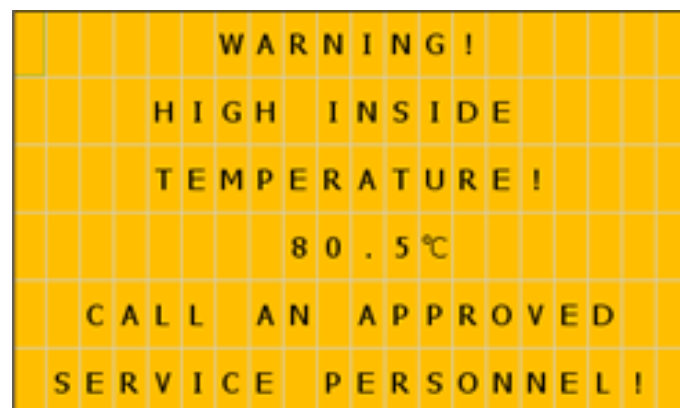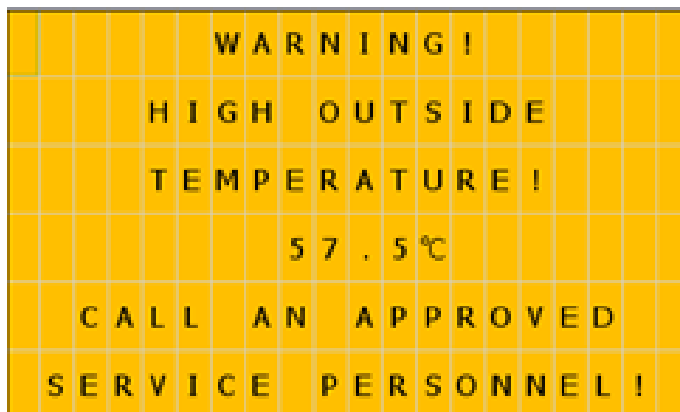

Условия подачи аварийных сигналов со средним приоритетом

- Неполадка в узле


Сообщение на дисплее (FAULT) и индикатор P2-ALARM (17) указывают на то, что агрегат не работает (прерыватель цепи двигателя (Q1–Q6) отключился из-за перегрузки по току). Дисплей мигает красным цветом.

Другие агрегаты работают нормально.

После устранения неисправности экран исчезает, а прерыватель электрической цепи вручную переводится обратно в положение «ВКЛ.». Отображается экран для нормальной работы.

Компрессор только подает сжатый воздух на центральную линию через функциональные агрегаты.

Все сведения об аварийных сигналах автоматически записываются на карту SD.

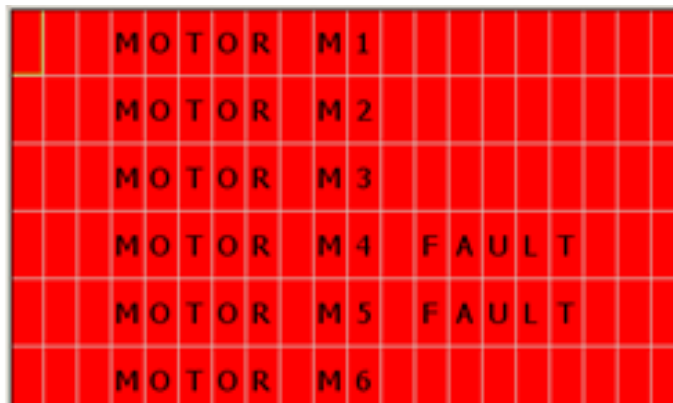

Аварийный сигнал имеет более высокий приоритет, чем сигнал о необходимости технического обслуживания. Световой сигнал может свидетельствовать об аварии на любом из агрегатов.



Все сигналы об ошибках (NON VOLT ALARM SIGNAL) подключены к выходу контроллера K3:Q3.2 и клеммам X1:44 и X1:45 (на панели управления).

Сбор данных

Данные записываются на карту SD, находящуюся в гнезде базового модуля. На эту карту записываются данные о неисправностях и событиях, возникших во время эксплуатации оборудования. Информация сохраняется в виде CSV-файлов. Система последовательно сохраняет данные в 50 файлов, каждый из которых может содержать до 20 000 строк.

Чтобы скопировать данные с карты SD, необходимо вручную извлечь ее и загрузить данные с помощью программы Excel на компьютере или дистанционно по сети Ethernet.

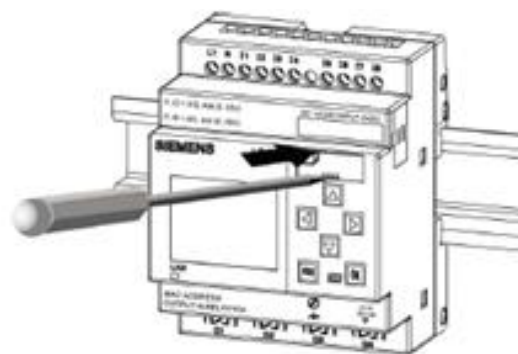


Рис. 26: Сбор данных

17. ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА

Чтобы выключить компрессор для технического обслуживания или по другим

причинам, воспользуйтесь главным выключателем Q10. Кроме того, этот

выключатель можно использовать в качестве центральной кнопки останова. Компрессор будет отключен от электросети (за исключением клеммной колодки электросети X0).

Чтобы выпустить воздух из ресивера, отключите его от централизованной системы циркуляции сжатого воздуха и откройте выходной клапан (7) (Рис. 1) или

клапан слива конденсата (15).



Силовые клеммы X0 остаются включенными, даже если главный выключатель Q10 находится в положении «О» (ВЫКЛ.)..

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Оператор должен проводить испытание оборудования по меньшей мере каждые 24 месяца (по стандарту EN 62353) или с периодичностью, указанной в действующих местных нормах. Результаты испытаний (например, в соответствии с приложением G стандарта EN 62353), а также методы исследования должны быть задокументированы в письменном виде.

Оборудование спроектировано и произведено таким образом, чтобы свести техническое обслуживание к минимуму. Чтобы обеспечить надлежащую и надежную работу компрессора, необходимо выполнить описанные ниже работы.



Опасность несанкционированного вмешательства.

Ремонтные работы, выходящие за рамки стандартного технического обслуживания (см. раздел 18.1), должен осуществлять только квалифицированный технический специалист (организация, уполномоченная производителем) или представитель производителя.

Работы по стандартному техническому обслуживанию (см. раздел 18.1) должен осуществлять только обученный персонал оператора.

Используйте только утвержденные производителем запасные части и принадлежности..



Опасность травмирования персонала или повреждения оборудования.

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию компрессора:

- проверьте, можно ли отключить компрессор от соответствующего устройства-потребителя, чтобы исключить риск травмирования лиц, использующих это устройство, и избежать материального ущерба;
- выключите компрессор;
- отключите его от электрической сети, вынув вилку из розетки;
- стравите давление из ресивера.

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию осушителя:

- выключите подачу сжатого воздуха к осушителю;
- переведите главный выключатель, расположенный на боковой стенке распределительного щита, в положение «0» (Выкл.);
- проверьте индикатор давления на осушителе и при наличии оставшегося давления стравите его из камеры осушителя.



Стравливание давления представляет опасность травмирования.

При стравливании давления из линии сжатого воздуха (ресивера) и камеры осушителя необходимо защищать глаза, например защитными очками.



Опасность получения ожогов.

Во время работы компрессора или в течение короткого промежутка времени после его выключения определенные части агрегата, системы сжатого воздуха компрессора, детали осушителя и соединительные шланги между компрессором и осушителем могут быть горячими, поэтому не прикасайтесь к ним.

Перед техническим обслуживанием или подсоединением/отсоединением подачи сжатого воздуха дайте оборудованию остыть!

допускать только обученных сотрудников:



Pred Прежде чем приступить к любым из указанных ниже работ по техническому обслуживанию, переведите главный выключатель, расположенный на боковой стенке распределительного щита, в положение «0» (Выкл.).



Чтобы обеспечить надлежащую и безопасную работу оборудования, придерживайтесь рекомендованной периодичности технического обслуживания.

К описанным ниже работам следует



18.1. Периодичность технического обслуживания

Интервал	Раз в день	Раз в неделю	Раз в год	Раз в 2 года	2000 ч	4000 ч	6000 ч	8000 ч	10000 ч	12000 ч	16000 ч	Раздел	Комплект запчастей	Исполнитель
Эксплуатационная проверка изделия	x											18.2	-	
Очистка всасывающих фильтров компрессора ^{а)}		x										18.8	-	
Слив конденсата	x											18.5		
Проверка работы вентиляторов компрессора		x										Визуальная проверка вращения во время работы агрегата	-	
Проверка охладителя и вентилятора осушителя			x									18.20	-	
Очистка всасывающих фильтров компрессора ^{а)}					x	x	x	x	x	x		18.8	-	
Замена всасывающих фильтров компрессора ^{а)}					x	x	x	x	x	x		18.8	604031770-000	
Осмотр оборудования					x	x	x	x	x	x		18.3	-	
Проверка работы вентиляторов компрессора					x	x	x	x	x	x		Визуальная проверка вращения во время работы агрегата	-	

^{а)} Применимо только для компрессоров с корпусами

Интервал	Раз в день	Раз в неделю	Раз в 2 года	Раз в 2000 ч					Раз в 8000 ч					Раз в 10000 ч					Раз в 12000 ч					Раздел	Комплект запчастей	Исполнитель
				ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч						
Проверка электрических соединений				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.4	-				
Проверка работы обратных клапанов					х			х							х						18.10	-				
Проверка датчика давления				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.13	-				
Проверка клапана сброса избыточного давления				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.22	-				
Проверка функции переключения датчика температуры				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.12	-				
Проверка предохранительного клапана			х		х			х							х						18.7	-				
Проверка электромагнитного клапана					х			х							х						18.11	-				
Замена всасывающего фильтра агрегата			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.6	604031761-000				
Замена внутренних фильтров осушителя										х					х					х	18.16	025200322-000				
Проверка работы компрессора				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.9	-				
Проверка пневматических соединений на утечки				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	18.3	-				
Замена кассет с адсорбентом Осушитель AD2250E										х					х					х	18.17	603031894-000				
Замена шарика логического клапана осушителя										х					х					х	18.18	069000442-000				
Замена глушителя осушителя										х					х					х	18.19	025400339-000				
Замена NC электромагнитного клапана осушителя																				х	18.21	025300117-001				
Повторные испытания в соответствии со стандартом EN 62353			х																		18	-				

а) Применимо только для компрессоров с корпусами

18.2. Эксплуатационные проверки

- Проверьте состояние узлов — они должны нормально функционировать без излишних вибрации и шума. В случае выявления проблемы устраните ее или обратитесь к обслуживающему персоналу.
- Визуально осмотрите вентиляторы — они должны работать вместе с узлами. В случае выявления проблемы устраните ее или обратитесь к обслуживающему персоналу.
- Убедитесь, что шнур питания, кабель датчика давления на ресивере и соединительные шланги сжатого воздуха не повреждены. Замените поврежденные компоненты или обратитесь к обслуживающему персоналу.
- Проверьте температуру окружающей среды на дисплее — она должна быть ниже предельного значения (40 °C). В противном случае охладите помещение.
- Проверьте состояние аварийного сигнала на дисплее — устраните неисправности и все аварийные сигналы.

18.3. Проверка соединений для сжатого воздуха на предмет утечки и осмотр оборудования

Проверка на наличие утечки

- Проверьте герметичность линий подачи сжатого воздуха при работе, когда компрессор подает давление.
- Чтобы проверить все соединения на предмет утечки, воспользуйтесь соответствующим анализатором или мыльной водой. В случае выявления утечки затяните соответствующие соединения или поменяйте в них уплотнение.

Проверка оборудования

- Проверьте узел компрессора на предмет нормальной работы и уровня шума.

- Проверьте работу вентиляторов: вентиляторы должны работать в течение определенных рабочих циклов компрессора.
- Проверьте состояние фильтров: очистите загрязненные фильтры или замените их новыми.
- Проверьте электромагнитные клапаны в клапанном модуле.
- Проверьте работоспособность системы автоматического слива конденсата.
- При подозрении на неисправность обратитесь к обслуживающему персоналу.

18.4. Проверка электрических соединений



Опасность поражения электрическим током.

Проверку электрических соединений необходимо выполнять при отключенном питании.

- Проверьте механическую работу главного выключателя Q10 и кнопок START/STOP, S1 и S2.
- Убедитесь, что кабель питания, проводники, подключенные к клеммной колодке X1 и главному выключателю, не повреждены. Проверьте, правильно ли поддерживаются соединительные клеммы, чтобы снять напряжение.
- Убедитесь, что все резьбовые клеммы проводника плотно затянуты (на выключателях двигателя Q1 - 9, устройства защиты цепей F1 - 3, контакторах Q11–19, и т. д.). Затяните все ослабленные клеммы отверткой.
- Визуально проверьте подключение отдельных кабелей к клеммной колодке X1 (пружинные зажимы) и систему управления LOGO! (винтовые клеммы).
- Проверьте все винтовые клеммы для защитных зеленых и желтых проводников заземления PE в

распределительном щите, секции двигателя, охлаждающем устройстве и напорном резервуаре. Затяните все ослабленные клеммы.

- Проверьте разъем X50 (осушитель и охладитель) и датчик давления (B1) (на напорном резервуаре)

Конденсат из компрессоров с осушителями воздуха автоматически сливается в резервуар для сбора конденсата.

- Отслеживайте уровень в резервуаре, руководствуясь отметками (в зависимости от объема резервуара), и сливайте конденсат не реже одного раза в день.

18.5. Слив конденсата



При переполнении резервуара возникает опасность поскользнуться на мокром полу.

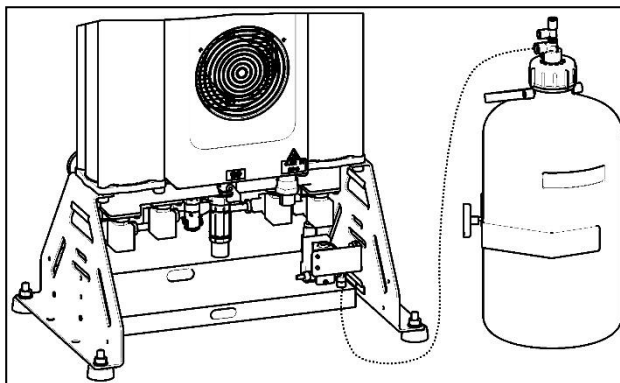


Рис. 27: Проверка резервуара для сбора конденсата

18.6. Замена всасывающего фильтра агрегата



Фильтры, расположенные на крышке корпуса узла компрессора, необходимо заменять с определенной периодичностью.

Замена всасывающего фильтра:

- Рукой снимите резиновую заглушку (2).
- Выньте загрязненный всасывающий фильтр (1).
- Вставьте новый фильтр и установите резиновую заглушку.

Замена фильтра предварительной очистки:

- Рукой извлеките фильтр предварительной очистки (3).
- Установите новый фильтр.

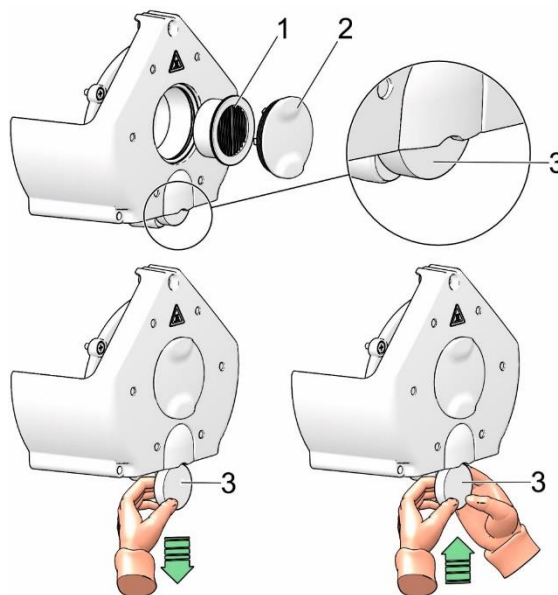


Рис. 28: Замена всасывающего фильтра

18.7. Проверка предохранительного клапана



Повреждение предохранительного клапана может привести к повышению давления до опасного уровня.

Запрещается использовать предохранительный клапан для сброса давления воздуха в ресивере. Это может повредить предохранительный клапан. Максимально допустимое давление для клапана настроено производителем.

Запрещается регулировать предохранительный клапан.



Стравливание представляет травмирование.

давления
опасность

При проверке предохранительного клапана надевайте защитные очки.

- Поверните винт предохранительного клапана на несколько оборотов влево, пока воздух не начнет выходить через клапан.
- Стравливайте воздух через предохранительный клапан лишь несколько секунд.
- Закройте клапан, повернув винт вправо до упора.

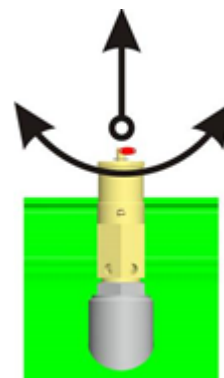


Рис. 29: Проверка предохранительного клапана

18.8. Очистка/замена всасывающего фильтра компрессора

Применимо только к изделиям, оснащенным корпусом.

Выполняйте очистку или замену всасывающих фильтров с заданной периодичностью:

- Снимите гайки (1) и две крышки (4) в нижней части корпуса под агрегатами и снимите фильтры (5). (Рис. 30)
- Снимите гайки (1) и три крышки (2) внутри корпуса и снимите фильтры (3).
- Если фильтр сильно загрязнен, очистите или вымойте его в растворе мыльной воды, после чего дождитесь, пока он полностью высохнет.
- Установите высохшие фильтры обратно (для сборки используйте обратный порядок действий)

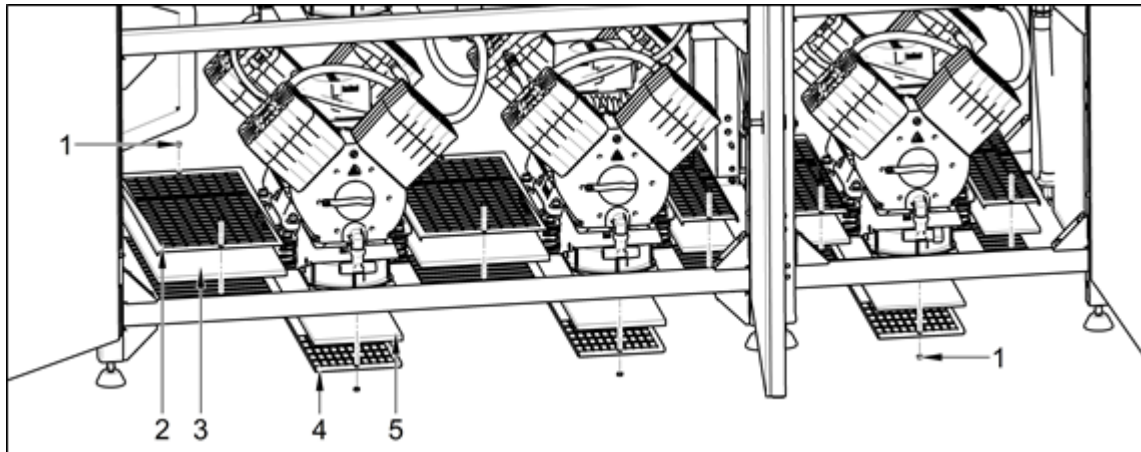


Рис. 30: Очистка/замена всасывающего фильтра компрессора

- В точке А удалите пену, 4 винта (5), шайбы (6) и снимите крышку всасывающего фильтра (7) (Рис. 31).
- Открутите 2 гайки (8) на кронштейне (9) фильтра и снимите фильтр (10).
- В точке В (на боковых поверхностях (11)) снимите 2 гайки (12), шайбы (13), кронштейн фильтра (14), а затем и сам фильтр (15).
- Если фильтр сильно загрязнен, очистите или вымойте его в растворе мыльной воды, после чего дождитесь, пока он полностью высохнет.
- Установите высохшие фильтры обратно (для сборки используйте обратный порядок действий).

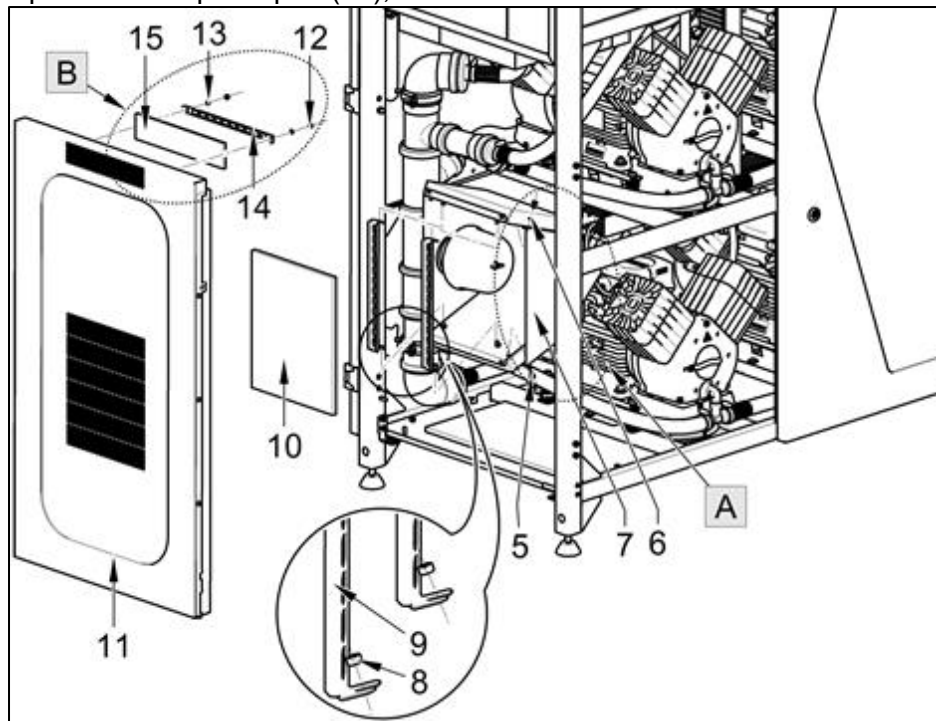


Рис. 31: Очистка/замена всасывающего фильтра компрессора

18.9. Проверка работы компрессора

- Отключите компрессор с помощью кнопки STOP (СТОП).
- Сбросьте давление воздуха в ресивере до нуля.

- Включите компрессор с помощью кнопки START (СТАРТ).
- Измерьте время наполнения ресивера при давлении от 0 до 7 бар.
- Измеренное значение должно быть меньше указанного в таблице «Технические характеристики».



Один из агрегатов должен работать постоянно, в то время как остальные агрегаты можно отключить с помощью устройства токовой защиты на распределительном щите. Утечка сжатого воздуха через обратные клапаны недопустима.

18.10. Проверка работы обратного клапана

Контур сжатого воздуха:

Проверьте правильность работы всех обратных клапанов в пневматической системе, отсоединив напорные шланги от агрегатов.

Ресивер:

Проверьте правильность работы обратного клапана на ресивере, отсоединив напорный шланг от клапана.



Проверку обратного клапана следует выполнять, когда ресивер находится под давлением, а компрессор выключен. Утечка сжатого воздуха не допускается.

18.11. Проверка работы электромагнитного клапана

Проверяйте их работу с помощью магнитного индикатора следующим образом:

- Поместите магнитный индикатор на обмотку клапана. Если двигатели на обмотке клапана активны, индикатор должен вращаться. Если они неактивны, индикатор не должен вращаться.



Рис. 32: Проверка работы электромагнитного клапана

18.12. Проверка переключения датчика температуры

Проверьте функционирование датчиков температуры В3 (внешний) и В4

(внутренний).

Датчик В4 используется только на моделях с корпусами.

- Эта проверка выполняется с использованием дисплея LOGO!TDE, при этом мгновенные значения температуры отображаются на начальном экране в режиме STOP (СТОП).
- Проверка основана на незначительном изменении температуры вокруг датчика, т. е. на изменении, вызванном нагревом, или же на изменении температуры, отображаемой на дисплее. На моделях без корпусов датчик B4 не подсоединен, и дисплей показывает значение N/A.

C	O	N	T	R	O	L	I	N	G				0	0	:	0	0	m
														</				

Рис. 33: Проверка переключения температурного переключателя

18.13. Проверка функционирования датчика давления

Эта проверка выполняется визуально с помощью экрана TDE, на котором отображается значение давления сжатого воздуха. Уровень давления, отображаемый на экране, должен изменяться вместе с изменением потребления воздуха.

18.14. Очистка и дезинфекция внешних поверхностей изделия

Очистите и продезинфицируйте внешние поверхности при помощи химически нейтральных продуктов.



Использование агрессивных чистящих продуктов и дезинфицирующих веществ, содержащих спирт и хлориды, может привести к повреждению или изменению цвета поверхности.

Техническое обслуживание адсорбционного осушителя

18.15. Стравливание давления из осушителя

Оборудование предназначено для обеспечения безопасного стравливания давления в течение 10 секунд после выключения компрессора.

Если давление не стравливается

автоматически из осушителя, его можно стравить вручную.



Стравливание давления представляет опасность травмирования.

Учитывая шум, производимый в процессе стравливания, рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.



Прежде чем стравливать давление из оборудования, перекройте источник сжатого воздуха.

Стравливание давления с помощью экрана дисплея

Чтобы стравить давление из оборудования, нажмите кнопки ESC+▼ на экране дисплея.

- Сначала перекройте источник сжатого воздуха.
- Затем нажмите и удерживайте кнопки ESC+▼, что приведет к открытию всех электромагнитных клапанов (вход и восстановление) на 10 секунд и затем к стравливанию давления из оборудования и подсоединенных пневматических контуров и элементов, которые не отделены от оборудования обратным клапаном.

Ручное стравливание давления

- Выключите компрессор.
- Откройте вентиляционные пробки на выходном модуле оборудования (Рис. 34).

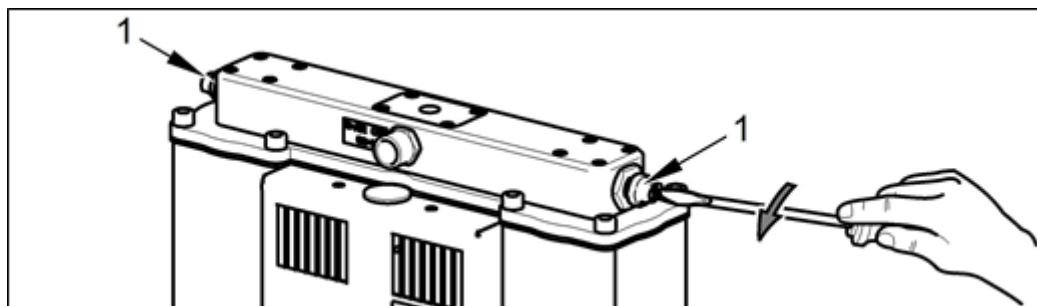


Рис. 34: Стравливание давления из камер осушителя

- Отсоедините шланг (2) от нижней части отделителя конденсата (3) (Рис. 35).

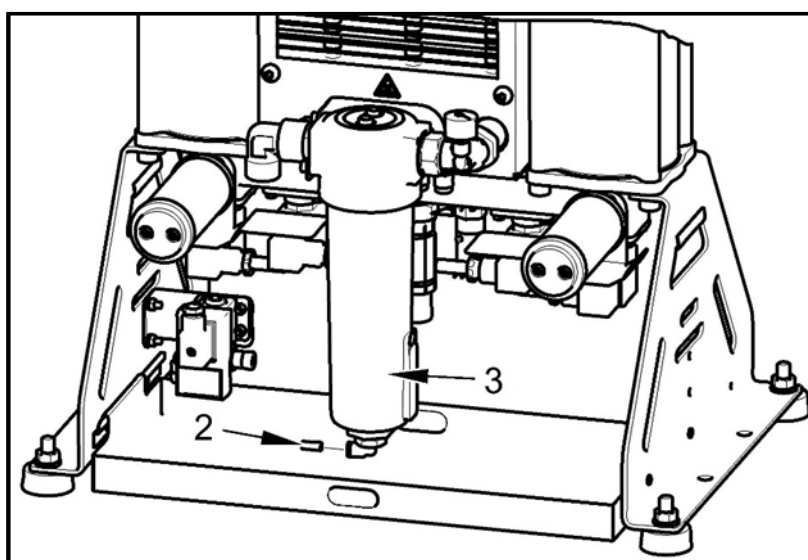


Рис. 35: Стравливание давления из охладителя и отделителя конденсата

Процесс ручного стравливания давления из оборудования завершается по истечении приблизительно 2 минут.

части осушителя с определенной периодичностью.

18.16. Замена внутренних фильтров осушителя



Работа с пневматическими компонентами, находящимися под давлением, представляет опасность травмирования.

Прежде чем выполнять какие-либо работы, отключите оборудование от электросети, выключите компрессор и стравите все давление в оборудовании до нуля.

При нормальной эксплуатации замену фильтров следует выполнять в верхней

- Выключите компрессор.
- Проверьте давление в осушителе.
- Если камеры осушителя находятся под давлением, выполните действия в соответствии с пунктом 18.15.
- Отвинтите 8 винтов (1).
- Демонтируйте выходную панель (2), на которую монтируются фильтры (3).
- Выкрутите загрязненные фильтры (3) и замените их новыми.
- Проверьте уплотнение (4) в нижней части выходного модуля и при необходимости замените его.
- Выполните действия в обратной последовательности, чтобы заново собрать модуль.
- Включите компрессор.
- Проверьте осушитель на наличие утечек.

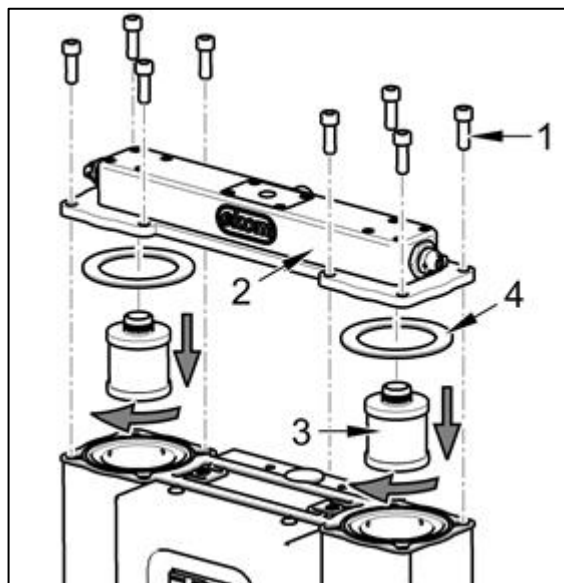


Рис. 36: Замена внутренних фильтров

18.17. Замена кассет с адсорбентом

При нормальной эксплуатации замену

кассет с адсорбентом следует выполнять с определенной периодичностью.

- Выключите компрессор.
- Проверьте давление в осушителе.
- Если камеры осушителя находятся под давлением, выполните действия в соответствии с пунктом 18.15.
- Отвинтите 8 винтов (1).
- Снимите выходную панель (2).
- Вытяните кассеты (3) и замените их новыми.
- Проверьте уплотнение (4) в нижней части выходного модуля и при необходимости замените его.
- Выполните действия в обратной последовательности, чтобы заново собрать модуль.
- Включите компрессор.
- Проверьте осушитель на наличие утечек.

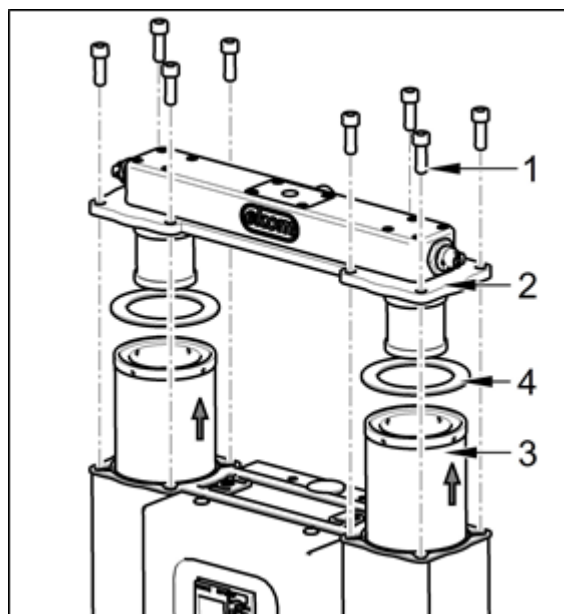


Рис. 37: Замена кассет с адсорбентом

18.18. Замена шарика логического клапана

- Выключите компрессор.
- Проверьте давление в осушителе.
- Если камеры осушителя находятся под давлением, выполните действия в соответствии с пунктом 18.15.
- Отвинтите 4 винта (1) и снимите крышку (2).
- Снимите крышку шарика (3).
- Замените шарик (4).
- Проверьте форсунки (5) и при необходимости очистите.
- Выполните действия в обратной последовательности, чтобы заново собрать модуль.
- Выполните проверку на наличие утечек, а также проверку работы логического клапана и форсунок — проверку циклического переключения камер.

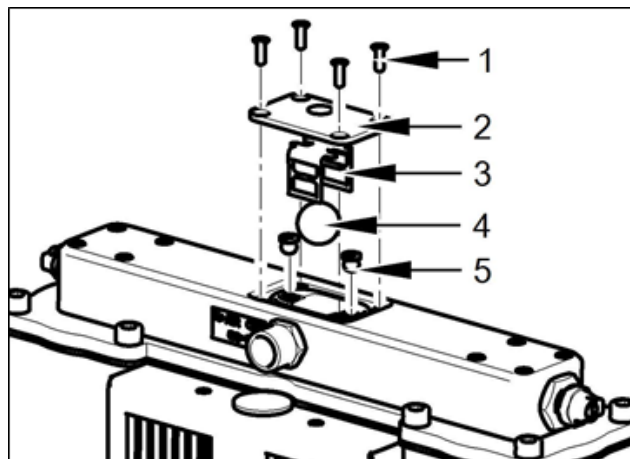


Рис. 38: Замена шарика логического клапана

18.19. Замена глушителя осушителя



Работа с пневматическими компонентами, находящимися под давлением, представляет опасность травмирования.

Эксплуатация оборудования без глушителей производит шум высоких уровней. Выполняйте замену глушителей только при выключенном оборудовании.

- Открутите глушитель (1).
- Установите новый глушитель.

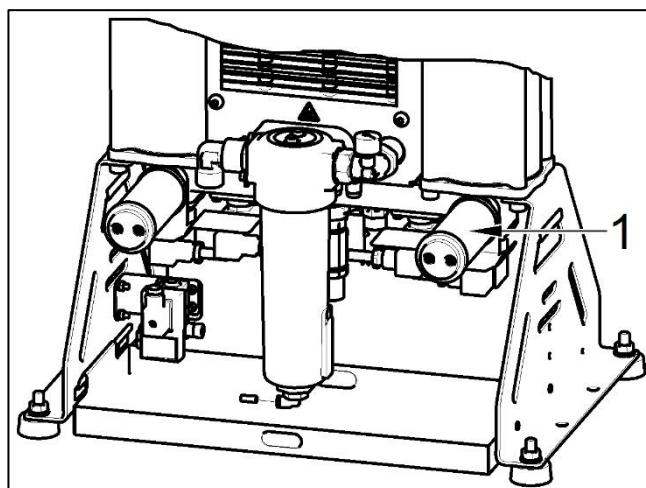


Рис. 39: Замена глушителя

18.20. Проверка охладителя и вентилятора

Чтобы обеспечить эффективное осушение, необходимо содержать в чистоте оборудование, особенно вентилятор компрессора, вентилятор охладителя и охладитель. Удаляйте пыль с поверхности вентиляторов и ребер охладителя пылесосом или продувайте их сжатым воздухом.

18.21. Замена электромагнитных клапанов



Опасность поражения электрическим током.

Прежде чем выполнять работы на оборудовании, перекройте источник сжатого воздуха, выключите оборудование и отключите его от электрической сети.



Работа с пневматическими компонентами, находящимися под давлением, представляет опасность травмирования.

Прежде чем выполнять работы на оборудовании, отключите оборудование от электросети и сбавьте давление в оборудовании и пневматической системе до нуля.

При нормальной эксплуатации замену электромагнитных клапанов в нижней части осушителя следует выполнять с определенной периодичностью.

- Выключите компрессор.
- Проверьте давление в осушителе.

- Если камеры осушителя находятся под давлением, выполните действия в соответствии с пунктом 18.15.
- Отвинтите 1 винт от соединителя клапана (1).
- Отсоедините соединитель клапана (2).
- Отвинтите 4 винта (3).
- Снимите электромагнитный клапан (4).
- Снимите с корпуса уплотнение клапана (4-1).
- Почистите контактную поверхность клапана, чтобы удалить имеющуюся грязь.
- Почистите 16 винтов, чтобы удалить резьбовой герметик.
- Установите электромагнитный клапан (см. Рис. 41).
- Установите новое уплотнение клапана (4-1).
- Установите новый электромагнитный клапан, используя 4 винта (3), предварительно нанеся на их резьбу резьбовой герметик (например, Loctite 243).
- Снова установите соединитель электромагнитного клапана и завинтите винт (1).
- Включите компрессор.
- Проверьте осушитель на наличие утечек.

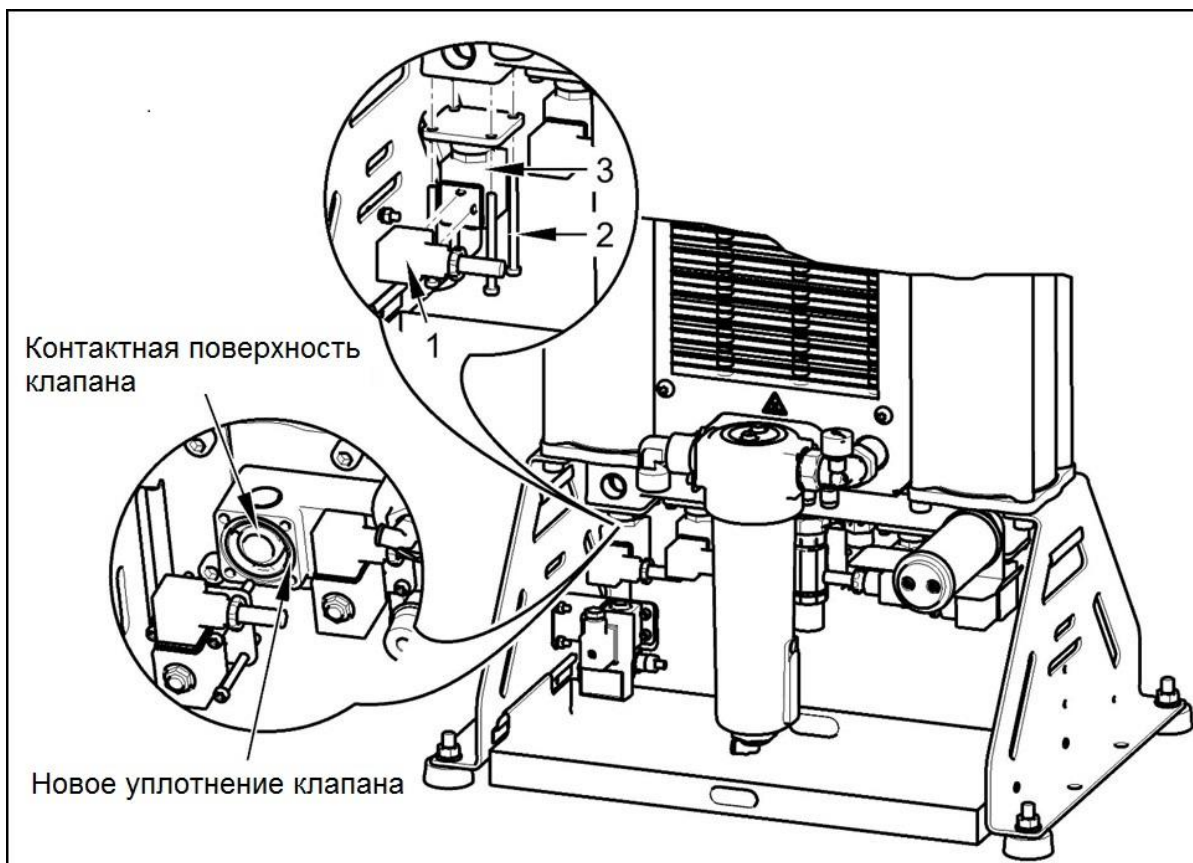


Рис. 40: Замена электромагнитного клапана

Сборка электромагнитного клапана

Запасные электромагнитные клапаны поставляются в разобранном виде. Перед заменой электромагнитного клапана необходимо собрать новый клапан.

- Установите обмотку клапана (4-5) на корпус клапана (4-4) и закрепите

ее при помощи гайки (4-6).

- Вставьте пружину мембраны клапана (4-3) в мембрану (4-2) и в собранную обмотку клапана и корпус в сборе.
- Затем установите уплотнение клапана (4-1) на корпус осушителя.

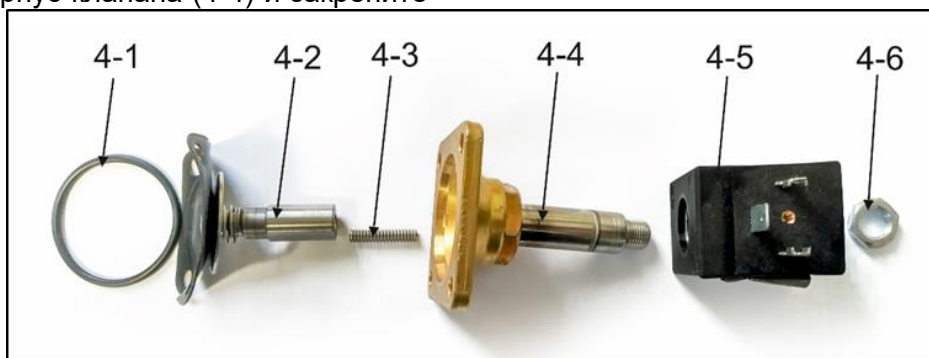


Рис. 41: Сборка электромагнитного клапана

18.22. Клапан сброса избыточного давления

Если давление в контуре сжатого воздуха превысит предварительно заданное

значение, клапан сброса избыточного давления автоматически начнет выпускать воздух из системы. После падения давления клапан сброса избыточного

давления закрывается.



Давление в контуре сжатого воздуха может только возрастать из-за увеличения сопротивления потоку в линиях подачи сжатого воздуха или в результате сбоя в работе осушителя (например, при выходе из строя электромагнитных клапанов). Поэтому если клапан сброса избыточного давления регулярно открывается, необходимо проверить работу осушителя и, возможно, отремонтировать его!



Перед настройкой клапана сброса избыточного давления необходимо проконсультироваться с изготовителем!

Выпускные отверстия на клапане сброса избыточного давления нельзя блокировать, и выход сжатого воздуха через них нельзя ограничивать.

- 1 Клапан сброса избыточного давления компрессора
- 2 Клапан сброса избыточного давления осушителя


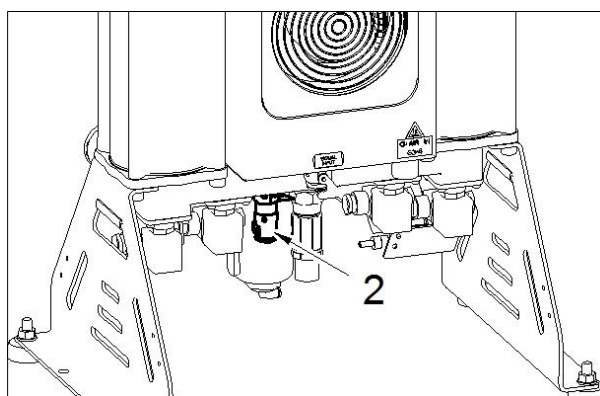


Рис. 42: Клапан сброса избыточного давления

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Опасность поражения электрическим током.

Прежде чем вмешиваться в работу оборудования, отключите его от электросети (вытяните вилку из розетки).

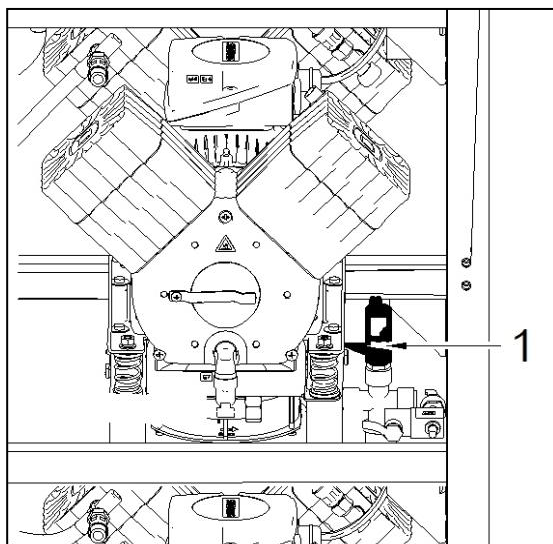

К работам по устранению неисправностей следует допускать только квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию.



Работа с пневматическими компонентами, находящимися под давлением, представляет опасность травмирования.

Прежде чем вмешиваться в работу оборудования, сбавьте давление в ресивере и системе сжатого воздуха до нуля.



Повреждение предохранительного клапана может привести к повышению давления до опасного уровня.

Запрещается регулировать предохранительный клапан.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Компрессор не запускается	Неисправность электрической сети питания	Главный выключатель отключен
	Нет питания	Проверьте напряжение сети
		Ослабленная клемма в распределительном щите — затяните
		Проверьте основное подключение к сети — замените при повреждении
Ни один из агрегатов не запускается (индикатор горит)	Сбой реле давления	Проверьте клеммы и работу реле давления — замените при повреждении
	Сбой питания двигателя	Проверьте напряжение сети
		Проверьте работу контакторов и тепловых реле — замените их, если они повреждены
		Ослабленные клеммы на клеммной колодке двигателя — затяните или замените, если они повреждены или сломаны
	Обмотка двигателя укорочена, повреждена / обнажена термоизоляция / высокая температура окружающей среды	Замените двигатель / снизьте температуру окружающей среды
	Заклинило поршень или другую подвижную деталь (механическое повреждение движущейся части)	Замените поврежденные детали
Индикатор RUN/STOP не горит	Сбой контроллера	Проверьте работу контроллера, проверьте наличие программного обеспечения — замените его, если он поврежден, или загрузите правильную программу
	Соединение между контроллером и модулем расширения потеряно	Проверьте соединение — замените при повреждении

зеленым	Нет питания	Проверьте напряжение сети
		Ослабленная клемма в распределительном щите — затяните
		Проверьте основное подключение к сети — замените при повреждении
	Неисправность электрической сети питания	Главный выключатель отключен
	Неисправность контроллера или модуля расширения	Заменить неисправный контроллер или модуль расширения
Агрегаты часто переключаются, даже когда нет необходимости в воздухе	Утечка воздуха из системы распределения сжатого воздуха	Проверьте систему распределения сжатого воздуха — уплотните негерметичные соединения
	Обратные клапаны, дающие утечку	Проверьте контрольные клапаны и очистите или замените, если они повреждены
	Утечка через электромагнитные клапаны после завершения восстановления	Очистите обратный клапан — замените, если поврежден
	Утечка на датчике давления и предохранительном клапане	Проверьте их работу и очистите или замените, если они повреждены
Производительность в некоторых агрегатах снижена, увеличен рабочий цикл	Агрегат протекает	Проверьте соединения агрегата на наличие утечек — затяните соединения, дающие утечку
	Изношены поршневые кольца	Замените изношенные поршни
	Прокладка между головкой цилиндров и пластиной клапана повреждена	Замените прокладку, затяните
	Засорился всасывающий фильтр	Замените старый фильтр новым
Один из агрегатов издает шум (стук, металлический шум)	Поврежден подшипник двигателя	Замените поврежденный подшипник
	Поврежден поршневой подшипник, шатун	Замените поврежденный поршень
	Неисправна (лопнула) пружина резиновой опоры	Замените поврежденную пружину новой
Высокая температура окружающей среды приводит к отключению компрессоров в вертикальных стопках (перегрев)	Недостаток вентиляции в компрессорном помещении	Обеспечьте соответствующие условия окружающей среды
	Охлаждающие вентиляторы агрегатов, охладителя и корпуса не работают	Неисправные вентиляторы — заменить Неисправный температурный переключатель — заменить
Пониженная степень осушения воздуха — высокая температура конденсации под давлением (конденсированная вода в воздухе)	Низкое рабочее давление	Уменьшите потребление воздуха, проверьте выход из источника сжатого воздуха, устраните имеющиеся утечки в системе распределения
	Не работает электромагнитный клапан восстановления	Проверьте работу обмотки, замените при повреждении
	Засорена форсунка восстановления воздуха	Очистите или замените форсунку (см. техническое обслуживание изделия)
	Не работает охлаждающий вентилятор	Проверьте источник питания вентилятора Замените поврежденный вентилятор

	Загрязненный охладитель	Проверьте охладитель и при необходимости очистите
	Заблокированный глушитель на выходе из клапана восстановления	Проверьте глушители. Очистите или замените глушитель, если сопротивление потоку очень высокое или глушитель сильно засорен.
Осушитель производит шум высоких уровней	Поврежденный вентилятор	Замените поврежденный вентилятор
	Поврежденный глушитель	Замените глушитель
	Утечка воздуха через клапан сброса избыточного давления на входе в осушитель	Проверьте подключение осушителя к сети и соединения осушителя, проверьте работу осушителя, проверьте рабочее давление осушителя, замените неисправные компоненты.
Утечка воздуха через клапан сброса избыточного давления на входе в осушитель	Компрессор работает при высоком рабочем давлении	Проверьте настройку рабочего давления компрессора
	Не работает электромагнитный клапан на входе в осушитель	Проверьте работу обмотки, замените при повреждении Проверьте состояние клапана — очистите клапан или замените, если проблему не удастся устранить
	Высокое давление в оборудовании в результате засорения фильтров	Проверьте внутренние фильтры и дополнительные фильтры в сборе. Очистите или замените засоренные фильтры.

После решения проблемы и сборки осушителя необходимо полностью освободить ресивер от конденсата, а затем осушить ресивер и восстановить осушитель. Лучше всего сделать это с помощью непрерывной работы компрессора при давлении около 7,0 бар в течение не менее 1 часа.



Проверьте содержание влаги в воздухе, выходящем из ресивера (см. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ), чтобы предотвратить повреждение подсоединенного на выходе оборудования.

19. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГАХ ПО РЕМОНТУ

Гарантийный и послегарантийный ремонт должен проводить производитель, его представитель или обслуживающий персонал, одобренный поставщиком.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в оборудование без уведомления. Любые внесенные изменения не повлияют на функциональные свойства оборудования.

20. ХРАНЕНИЕ

Если компрессор не будет использоваться в течение продолжительного времени, рекомендуется слить весь конденсат из ресивера и отделителя конденсата. Затем включите компрессор на 10 минут, оставив

клапан слива на ресивере открытым (15) (Рис. 1). Выключите компрессор с помощью главного выключателя (19) (Рис. 2), закройте клапан слива конденсата и отключите оборудование от электросети.

21. УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от электросети.

- Сбросьте давление воздуха в напорном резервуаре, открыв клапан слива (15) (Рис. 1).
- Утилизируйте оборудование согласно принятым природоохранным нормам.
- Для этого обратитесь в специализированную компанию, занимающуюся сортировкой и утилизацией отходов.
- Отработанные компоненты не должны оказывать отрицательного влияния на окружающую среду.

ПРИЛОЖЕНИЕ

22. СОПОСТАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Parameter VM Mapping					
ID	Block	Parameter	Type	Address	
1	C019 HOURS RUN [Hours Counter]	OT - hour:minute	DWord	0	
2	SF018 PRESSURE [Mathematic instruction]	Aq amplified	Word	4	
3	SF023 TEMP_OUT [Analog Amplifier]	Ax, amplified	Word	6	
4	SF052 TEMP_IN [Analog Amplifier]	Ax, amplified	Word	8	
5	C019 HOURS RUN [Hours Counter]	MN - hour:minute	DWord	10	
6	C037 COUNTER_MN [Up/Down counter]	Counter	DWord	14	
7	SF025 MAX_TEMP_OUT [Max/Min]	Maximum value	Word	26	
8	SF050 MAZ_TEMP+IN [Max/Min]	Maximum value	Word	28	
9	C038 TOTAL HOURS [Hours Counter]	OT - hour:minute	DWord	30	
10	C091 HIGH CONSUMP [Up/Down counter]	Counter	DWord	34	
11	C095 FAULT M1 [Up/Down counter]	Counter	DWord	38	
12	C096 FAULT M2 [Up/Down counter]	Counter	DWord	42	
13	C099 FAULT M3 [Up/Down counter]	Counter	DWord	46	
14	C098 FAULT M4 [Up/Down counter]	Counter	DWord	50	
15	C100 FAULT M5 [Up/Down counter]	Counter	DWord	54	
16	C101 FAULT M6 [Up/Down counter]	Counter	DWord	58	
17	C041 SWITCH MOTOR [Up/Down counter]	Counter	DWord	62	
Creator:	Ing. Václav Milan	Project:	Customer:		
Checked:	Ing. Marek Jozef	Installation:	Diagram No.:		
Date:	5/23/17 3:33 PM/28/18 11:17 AM	File:	Page:		
		EKOM spol. s. o.	9X4VRTM_OML_V1_00_090218.lld	42/A-439	1/2

Parameter VM Mapping

ID	Block	Parameter	Type	Address
18	C045 SWITCH FAN [Up/Down counter]	Counter	DWord	70
19	C111 MN NDM COUNT [Up/Down counter]	Counter	DWord	74
20	C130 FAULT M7 [Up/Down counter]	Counter	DWord	78
21	C119 FAULT M8 [Up/Down counter]	Counter	DWord	82
22	C088 FAULT M9 [Up/Down counter]	Counter	DWord	86

Date:	9/23/17 3:33 PM/8/18 11:17 AM	File:	9x4VRTM_OMIL_V1_U1_090218.tld	Diagram No:	47A-439
Checked:	Ing. Meszar Jozsef	Installation:	OK50 6x4VRTSM_OH41 or NDMM	Customer:	
Creator:	Ing. Vancsik Milán	Project:			



DK50 9X4VRT/M

 EKOM spol. s r.o.
Priemyselná 5031/18, 921 01 PIEŠŤANY
Slovak Republic
tel.: +421 33 7967 211, fax: +421 33 7967 223
e-mail: ekom@ekom.sk, www.ekom.sk

NP-DK50-9x4VRTM-AD-RU-9_10-2024

112000452-0004

www.ekom.sk